

VERBINDINGSGIDS


Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare*




dexcom

Als u een mobiele Dexcom-toepassing gebruikt, gaat u direct naar stap 3.



- 1 **Maak een Dexcom Clarity-account aan** via deze site:
<https://uam2.dexcom.com/index.html#/register>

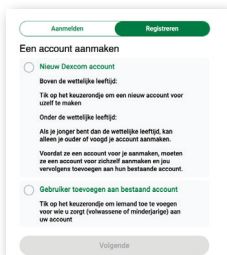

- 2 **Download de Dexcom Clarity Uploader van deze pagina:**
<https://clarity.dexcom.eu/?locale=fr-FR#/home-user-upload>
Download vervolgens de gegevens van de sensor naar Dexcom Clarity door de instructies op het scherm te volgen.

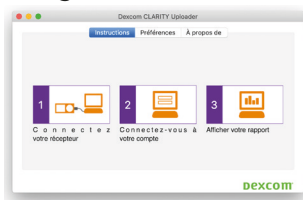



- 3 **Meld u aan op uw myDiabby healthcare-account** vanaf een computer **OF** de mobiele applicatie.
- 4 **Klik op het tabblad «Mijn geconnecteerde devices», vervolgens op «Ik verbind mijn bloedsuikerspiegelsensor continu».**

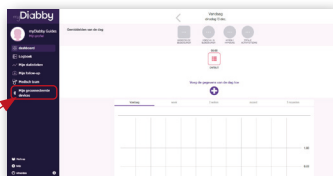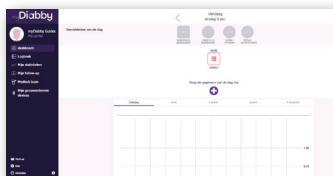

5 Kies de **Dexcom-** knop, klik vervolgens op de knop «**MIJN GEZONDHEIDSGAPPLICATIE VERBINDEN**»




6 Geef de gegevens en het wachtwoord van uw **Dexcom-account** in. Lees de gebruiksvoorwaarden, voer vervolgens uw naam in en klik op «**Toestaan**» om te accepteren.

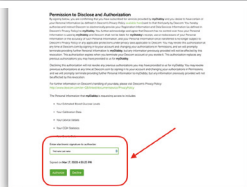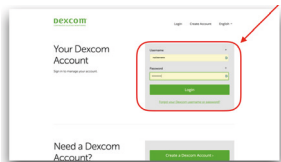

7 Dit bericht verschijnt op het scherm en bevestigt dat uw **Dexcom-account** verbonden is met **myDiabby healthcare**.

Klik op «**Terug**» om terug te keren naar myDiabby Healthcare.

De continue bloedsuikerspiegelgegevens worden nu gedeeld in de applicatie myDiabby Healthcare !

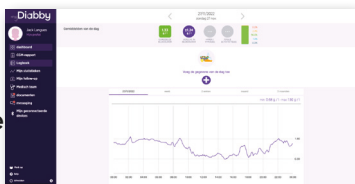

MERK OP

Download de Dexcom-sensorgegevens regelmatig naar Dexcom Clarity zodat het medisch team de resultaten kan zien op myDiabby Healthcare.

> Zodra de **Dexcom-** en **myDiabby Healthcare-**accounts zijn gekoppeld, worden er regelmatig automatisch gegevens verzonden. De weergegeven gegevens lopen **3 uur** achter op de laatst beschikbare gegevens.

> Indien u een **Dexcom G6** gebruikt in combinatie met de **t:slim X2 Tandem** insulinepomp, volstaat het dat u de pomp uploadt naar myDiabby om de **Tandem + G6** pompgegevens op myDiabby Healthcare te laten verschijnen.

Voor een vraag over de applicatie myDiabby: support@mydiabby.com of per telefoon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

Document van toepassing vanaf versie 2.32 van myDiabby Healthcare



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE



0459

GCDX/CV05D20250703NL