

VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*




Medtrum

- 1 Verbinden Sie die Pumpe TouchCare Nano oder 300 per Bluetooth mit der EasyPatch-App oder laden Sie Ihre PDM-Daten auf die EasyTouch-App hoch, wobei Sie der Anleitung für die Insulinpumpe folgen.

Mit der EasyPatch-App kann die Pumpe mit dem Smartphone gesteuert werden, die Daten werden automatisch auf die **Medtrum-Cloud** hochgeladen. Die in der Medtrum-Cloud verfügbaren Daten werden dann automatisch an myDiabby Healthcare gesendet, das ist die App, mit der man mit dem medizinischen Team in Verbindung steht.

- 2 Melden Sie sich über einen Computer ODER die mobile myDiabby-App bei Ihrem **myDiabby Healthcare-Konto** an.

- 3 Klicken Sie auf den Reiter «**Meine verbundenen Objekte**» und dann auf «**Ich verbinde eine Gesundheitsanwendung**».

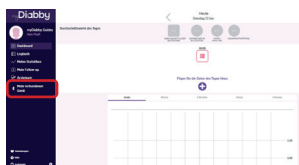

- 4 Wählen Sie die Schaltfläche **Medtrum**




- 5 Geben Sie Ihren **Benutzernamen** und das **Passwort für das EasyPatch / EasyTouch-Konto** ein. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen, **aktivieren** Sie das Kontrollkästchen zum Akzeptieren, geben Sie Ihren **Namen** in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie dann auf «**Zulassen**», um der Datenfreigabe zuzustimmen.

- 6 Diese Meldung erscheint auf dem Bildschirm auf und bestätigt, dass das **Medtrum-Cloud-Konto mit myDiabby Healthcare verbunden ist**. Klicken Sie auf «Rückkehr», um zu myDiabby Healthcare zurückzukehren.



Ihre Insulinpumpendaten werden jetzt auf myDiabby Healthcare geteilt!

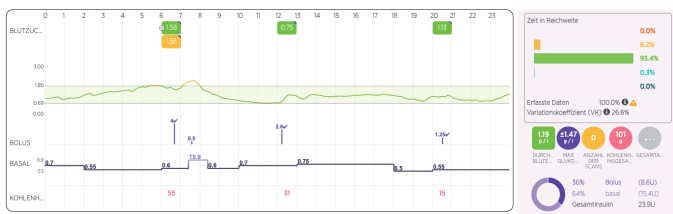

ZU BEACHTEN

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Daten Ihrer TouchCare-Insulinpumpe in der Medtrum-Cloud sichtbar sind, damit das Ärzteteam die Ergebnisse auf myDiabby Healthcare sehen kann.

> Das Herunterladen der Daten erfolgt bei der EasyPatch-App automatisch und bei der EasyTouch-App manuell.

> Sobald die Cloud-Konten von Medtrum und myDiabby Healthcare verbunden sind, werden die Daten regelmäßig automatisch gesendet. **Die angezeigten Daten liegen 3 Stunden hinter den neuesten verfügbaren Daten.**

Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.

Dokument anwendbar ab myDiabby Healthcare Version 2.30



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE



0459