

VERBINDINGSGIDS

Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare*



Unio™
Neva

Koppeling van de lezer met de applicatie myDiabby

- Download de 2 applicaties **myDiabby** en **mylife** op de telefoon. **Meld u aan** op elk van de 2 applicaties. Met de applicatie mylife kunt u gegevens van de bloedglucosemeter Unio Neva verzamelen. Mylife zal de gegevens vervolgens automatisch versturen naar myDiabby, dit is de toepassing waarmee u een verbinding kunt maken met het medisch apparaat.



App




myDiABBY
HEALTHCARE





- Sluit via Bluetooth de bloedglucosemeter Unio Neva aan op de applicatie mylife** door de gids op de lezer te volgen.

- Meld u aan op de applicatie **myDiabby** en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

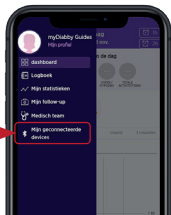


- Selecteer «Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan», vervolgens «MYLIFE Unio». Klik op de knop «Mijn gezondheidsapplicatie verbinden».

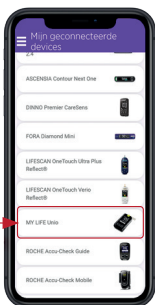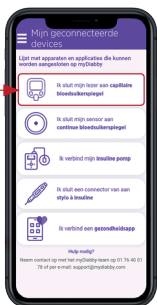

- 5 Geef de **aanmeldgegevens van de mylife-account in, bevestig** vervolgens.



- 6 De gegevens van Mylife Uno Neva worden nu gedeeld in de applicatie myDiabby!

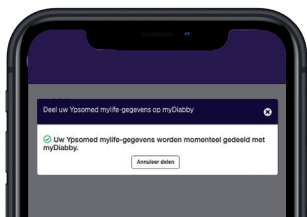

MERK OP

- Alle gegevens die manueel of via Bluetooth zijn ingegeven in de applicatie mylife worden gedeeld met de applicatie myDiabby (pompgegevens, bloedsuikerspiegel, maaltijden, enz.)
- Zodra de Mylife- en myDiabby Healthcare-accounts zijn gekoppeld, worden er regelmatig automatisch gegevens verzonden. Deze verzending kan leiden tot een vertraging tussen de synchronisatie van gegevens op Mylife en de weergave ervan op myDiabby Healthcare.



Voor een vraag over de applicatie myDiabby:
support@mydiabby.com of per telefoon
France : 01 76 40 01 78
Belgique : 02 320 11 96

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

Document van toepassing vanaf versie 2.30 van myDiabby Healthcare



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE



0459