



- 3 Öffnen Sie die **myDiabby-App** (auf Smartphone ODER Computer) und klicken Sie auf «**Daten hinzufügen**».

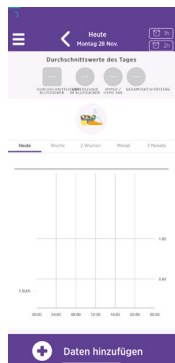

- 4 Scrollen Sie bis zum unteren Rand des Bildschirms und klicken Sie auf «**Importieren Sie Eine CSV-datei**» und dann auf «**Importieren Sie Eine CareLink CSV-datei**»

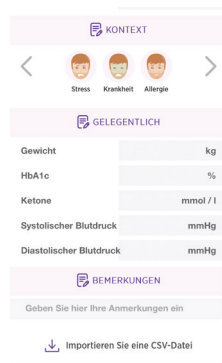

- 5 Wählen Sie die **.csv-Datei**, die von der CareLink-Website auf dem Telefon oder Computer gespeichert wurde.

- 6 Die Ergebnisse der MiniMed 780G-Pumpe und ihres Sensors werden nun über die myDiabby-App geteilt.



ZU BEACHTEN

Alle CareLink-Daten werden bei der Freigabe auf myDiabby Healthcare **geteilt**: Kontinuierliche Glukosedaten, Kapillarblutglukose, Basal, Bolus, Kohlenhydrate, Pumpeninformationen ...

myDiabby

HEALTHCARE

VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*



Medtronic MiniMed 780G

Schritt 1 : Setzen Sie die Pumpendaten auf die CareLink Plattform

Wenn Sie Ihre Pumpe mit der **MiniMed Mobile** App verwenden, werden Ihre Daten automatisch auf **CareLink** gespeichert.



Medtronic

Wenn Sie die App nicht verwenden, laden Sie die **Daten der Pumpe mithilfe des mit der Pumpe verbundenen Lesegeräts auf CareLink** hoch. Weitere Informationen finden Sie unter: carelink.minimed.eu/app/install-uploader



Schritt 2 : CareLink-Daten auf myDiabby Healthcare freigeben

Bei Fragen zur App myDiabby: support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78 Belgique : 02 320 11 96

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

GCM780V02D20241601DE

Methode 1:

Ihr CareLink-Konto mit dem myDiabby Healthcare Konto verbinden

1 Öffnen Sie die **myDiabby-App** (auf Smartphone ODER Computer) und klicken Sie auf den Reiter **«Meine verbundenen Gerät»**.

2 Klicken Sie auf die Kategorie **«Ich verbinde a Gesundheits-app»**.



Ich verbinde a Gesundheits-app

3 Wählen Sie in der Liste der kompatiblen Anwendungen **«CareLink»**.

CareLink™

4 Geben Sie Ihre **CareLink-ID** in dem dafür vorgesehenen Pop-up an. Dies ist derselbe Benutzername, den Sie zum **Einloggen in CareLink** oder in der **MiniMed Mobile** App verwenden.

Teilen Sie Ihre CareLink-Daten auf myDiabby Healthcare

Geben Sie Ihren CareLink-Benutzernamen ein:

Dies ist die Kennung, die Sie in CareLink oder der MiniMed Mobile-Anwendung verwenden

Bestätigen

5 Gehen Sie zu Ihrem **CareLink-Konto** und stimmen Sie der Freigabe zu, indem Sie auf den Link im Pop-up klicken oder über die automatische E-Mail, die Sie erhalten haben.

Zugriff für Diabeteszentrum

Neue Anfragen:

myDiabby Healthcare

Frankreich

75008, FR

Patientenname: DE test


✓ Annehmen

✗ Ablehnen

Ihr Gesundheitsdienstleister hat die Verknüpfung mit Ihrem CareLink™ Personal Konto angefragt. Wenn dieser Verknüpfungsprozess abgeschlossen ist, kann Ihr Gesundheitsdienstleister die Daten Ihrer verknüpften medizinischen Geräte sehen, die außerhalb Ihrer Präsenztermine in Ihr CareLink™ Personal Konto hochgeladen wurden.

6 Sobald Sie die Freigabe akzeptiert haben, kehren Sie zu Ihrem myDiabby Healthcare-Konto zurück, die **Daten werden nun automatisch freigegeben!**

Es kann einige Minuten dauern, bis die Daten wiederhergestellt sind, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

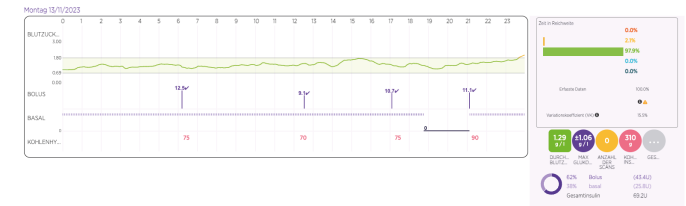

ZU BEACHTEN

Alle CareLink-Daten werden bei der Freigabe auf myDiabby Healthcare geteilt: Kontinuierliche Glukosedaten, Kapillarblutglukose, Basal, Bolus, Kohlenhydrate, Pumpeninformationen ...

Methode 2 :

Manuelles Wiederherstellen von CareLink Daten

Über den Internetbrowser eines Computers ODER eines Smartphones:

1 Gehen Sie auf carelink.minimed.com und loggen Sie sich mit denselben Zugangsdaten wie für die **MiniMed Mobile App** oder den **CareLink-Zugangsdaten** direkt in Ihr Patientenkonto ein.

2 Klicken Sie auf der CareLink-Website auf :
- Die Registerkarte **«Berichte»** oben links(gebogenes Symbol)

- Dann unten auf der Seite **«Daten exportieren (CSV)»**.

> Eine .csv-Datei mit den Pumpenergebnissen wird auf dem Telefon oder Computer gespeichert.

Anmelden zu CareLink™ PERSONAL

Land oder Region: Deutschland

Sprache: Deutsch

Weiter

Passwort vergessen?

oder

Konto erstellen

