

VERBINDINGSGIDS

Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare*



Pompgegevens delen met de myDiabby-applicatie met een telefoon

Benodigd materiaal

De **Android-smartphone** waarop de **applicatie myDiabby** is gedownload, **aangesloten** patiëntenaccount.



De PDM van de Omnipod Dash


Een adapter om een USB-kabel aan te sluiten op de smartphone



De USB-kabel van de Omnipod Dash-pomp

Hoe gaat u te werk?

- 1 Open de **myDiabby-applicatie** op uw telefoon en meld u aan met uw inloggegevens
- 2 Sluit **eerst de kabel aan op de telefoon** met de adapter
- 3 **Ontgrendel uw PDM Dash** (met uw pincode). Sluit **vervolgens de kabel aan op de PDM Dash**
- 4 In de PDM verschijnt de melding «PDM-gegevens exporteren» of «PDM laden?» > Klik op «EXPORTEREN». **Wacht** tot «Bestanden voorbereiden voor export» is voltooid
- 5 De PDM zegt «Uw PDM-gegevens zijn klaar om te worden geëxporteerd». Klik op «Klaar».
 - De PDM is klaar voor gegevensoverdracht naar de telefoon.
 - Het symbool van de kabel knippert en een voortgangsbalk verschijnt tijdens het delen van gegevens. **Wacht even.**

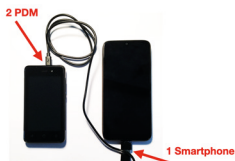

Opgelet :

Koppel de kabel niet los van de lezer of telefoon tijdens het delen van gegevens. Als er veel gegevens te delen zijn, kan de overdracht enkele minuten duren.



- 6 De **pompgegevens worden weergegeven op myDiabby!** U kunt nu de telefoon en de pomp loskoppelen.

Pompgegevens delen met de myDiabby-applicatie met een computer

- 1 **Download myDiabby Uploader voor Windows of voor Mac op de site www.mydiabby.com/uploader. Installeer myDiabby Uploader op uw computer.**




myDiABBY
UPLOADER

MyDiabby Uploader is een klein softwareprogramma dat op de computer moet worden geïnstalleerd om de gegevens van bloedglucosemeters, bloedglucosesensoren en insulinepompen te downloaden op uw account van myDiabby Healthcare.

- 2 **Meld u aan met uw gebruikelijke gegevens van myDiabby Healthcare en volg de instructies van de software.**



- 3 **Selecteer het apparaat/de apparaten die u wilt downloaden en bevestig**

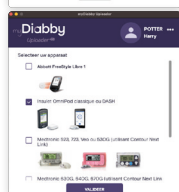

- 4 **Ontgrendel de PDM Dash met de pincode en sluit vervolgens de PDM Dash met een USB-kabel aan op de computer.**

- 5 **Kies op de PDM Dash «De gegevens exporteren». Wacht tot de gegevensexport is voltooid en druk dan op OK. Klik op «Verzenden» op myDiabby Uploader.**



- 6 **De gegevens worden nu geladen op myDiabby. Als het laden is voltooid, klikt u op de knop «Gegevens bekijken» om toegang te krijgen tot de gegevens op myDiabby**



- 7 **De resultaten zijn nu beschikbaar op myDiabby Healthcare (basale hoeveelheden, bolussen, bloedglucosewaarden, enz.)**

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:
support@mydiabby.com of per telefoon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

Document van toepassing vanaf versie 2.19 van myDiabby Healthcare



0459

GCOMNDV02D20241601NL