

VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*



Teilen der Pumpendaten mit der App myDiabby über Telefon

Erforderliche Hardware

Das **Smartphone**, auf das die **App myDiabby heruntergeladen wurde**, ein aktives Patientenkonto.



PDM von Tandem t:slim x2

Ein Adapter für den Anschluss eines USB-Kabels an das Smartphone



USB-Kabel der Tandem t:slim x2-Pumpe

Vorgehensweise

- Zunächst das Kabel über den Adapter mit dem Telefon verbinden**
- Das Kabel an die Pumpe anschließen.**
- Die App myDiabby öffnet sich direkt, das Teilen der Daten startet auf der App.**
Wenn die App die Freigabe für den USB-Port des Telefons verlangt, auf „Genehmigen“ oder „Freigeben“ klicken.
- Das Symbol für das Kabel blinkt und ein Fortschrittsbalken ist während des Teilens der Daten zu sehen. Warten Sie bis zum Ende der Übertragung.**



Achtung:

Das Kabel des Messgeräts oder des Telefons während des Teilens der Daten nicht abziehen. Wenn große Datenmengen zu teilen sind, kann die Übertragung mehrere Minuten dauern.

- Die Daten der Pumpe werden auf myDiabby angezeigt!**

Sie können jetzt Telefon und Tandem t:slim x2 trennen



Teilen der Pumpendaten mit der App myDiabby auf einem Rechner


- 1 myDiabby Uploader für Windows oder Mac auf folgender Website herunterladen: www.mydiabby.com/uploader



myDiABBY
UPLOADER

myDiabby Uploader ist ein kleines Programm, das auf einem Rechner installiert wird und **das Laden der Daten von Blutzucker-Messgeräten, Blutzuckersensoren und Insulindosen auf Ihr myDiabby Healthcare-Benutzerkonto gestattet.**

- 2 myDiabby Uploader auf Ihrem Rechner installieren.
Melden Sie sich mit Ihren üblichen Kenndaten für myDiabby Healthcare an und befolgen Sie die Anweisungen der Software.

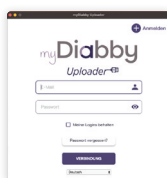

- 3 Wählen Sie die herunterzuladenden Geräte und klicken Sie auf **Bestätigen**.




- 4 Schließen Sie die Pumpe Tandem t:slim X2 über ein USB-Kabel an den Rechner an.

- 5 Klicken Sie auf „Senden“ auf myDiabby Uploader.



- 6 Die Daten werden auf den Rechner gezogen.

Hinweis > Wenn ein Dexcom-Sensor an die Pumpe Tandem t:slim X2 angeschlossen war, werden die kontinuierlich gemessenen Blutzuckerdaten ebenfalls an myDiabby übertragen.

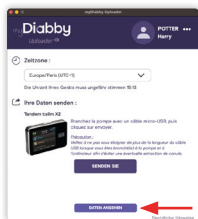

- 7 Am Ende des Herunterladens auf „Daten anzeigen“ klicken, um auf die myDiabby Online-Plattform zu gehen und alle Ihre Ergebnisse anzuzeigen.

Bei Fragen zur App myDiabby:

support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459

Dokument anwendbar ab myDiabby Healthcare Version 2.19

GCTX2V02D20241601DE