

VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*




ONETOUCH
Verio Reflect®

Kopplung des Blutzucker-Messgeräts mit der App myDiabby

Wenn Sie Ihr Blutzucker-Messgerät OneTouch Verio Reflect mit der App myDiabby koppeln, stellen sich Datum und Uhrzeit am Messgerät automatisch ausgehend von Datum und Uhrzeit des Telefons ein.

- 1 Aktivieren Sie **Bluetooth** auf Ihrem **Smartphone**
- 2 Melden Sie sich bei **myDiabby** an und öffnen Sie den Tab „**Meine verbundenen Geräte**“
- 3 Wählen Sie „**Ich verbinde mein kapillares Blutzucker-Messgerät**“ und wählen Sie danach Ihr Messgerät aus der Liste

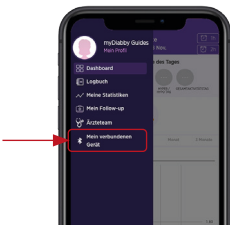


- 4 Klick auf den Button „**Ich verbinde mein Messgerät**“
- 5 Schalten Sie das Messgerät OneTouch Verio Reflect durch einen verlängerten Druck auf die Taste OK ein.



- 6 Aktivieren Sie **Bluetooth** auf dem Messgerät:
 - Im Menü des Messgeräts wählen Sie „**Einstellungen**“, dann „**Bluetooth**“
 - Wählen Sie „**Aktiviert**“
 - Drücken Sie die Taste Zurück (Pfeil nach links), um in den Startbildschirm des Messgeräts zurückzukehren
 - Das Symbol  (Bluetooth) wird oben rechts auf dem Display des Messgeräts eingeblendet



- 7 In der App myDiabby, Klick auf den Button „Mein Messgerät suchen“
- 8 Das Messgerät wird eingeblendet. Klick auf „Hinzufügen“
- 9 Geben Sie in der App den **sechsstelligen Zahlencode** ein, der auf dem Display des Messgeräts zu sehen ist, dann Bestätigen.

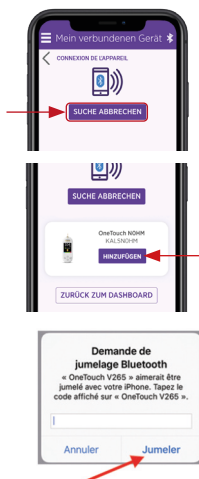


Täglicher Gebrauch

- 1 Die **Blutzucker-Messung** wie gewohnt mit dem Blutzucker-Messgerät durchführen.
- 2 Nachdem das Ergebnis auf dem **Display des Messgeräts eingeblendet wird**, den **Teststreifen vom Messgerät nehmen**, danach die App myDiabby in der Nähe zum **Messgerät auf dem Telefon öffnen** (darauf achten, dass Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist).
- 3 Das Ergebnis der Blutzuckermessung wird automatisch an die App myDiabby übertragen. *Wenn Sie auf dem Messgerät die Angabe vor/nach der Mahlzeit gemacht haben, wird dieser an myDiabby übertragen.*



Im Fall von Schwangerschaftsdiabetes:

Nach Einblenden des Blutzuckerwerts in der App myDiabby, die Tageszeit **ANKREUZEN** oder **ÜBERPRÜFEN**, damit das Ergebnis an der richtigen Stelle im Logbuch erscheint. Sie können **Anmerkungen** oder Insulindosen **hinzufügen**.

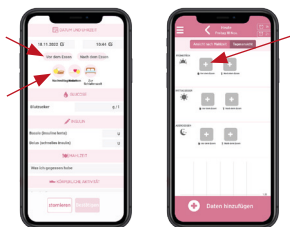

Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Élysées
75008 Paris
FRANCE

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459