

VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*



omnipod[®]
INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

Teilen der Pumpendaten mit der App myDiabby über Telefon

Erforderliche Hardware

Das **Smartphone**, auf das die **App myDiabby** heruntergeladen wurde, ein aktives Patientenkonto.



PDM von Omnipod Dash


Ein Adapter für den Anschluss eines USB-Kabels an das Smartphone



USB-Kabel der Omnipod Dash-Pumpe

Vorgehensweise

- 1 Öffnen Sie die **App myDiabby** auf Ihrem Telefon und melden Sie sich mit Ihren Kenndaten an
- 2 Zunächst das Kabel über den Adapter mit dem Telefon verbinden
- 3 Entsperren Sie Ihren PDM Dash (über PIN-Code). Schließen Sie danach das Kabel an den PDM Dash an

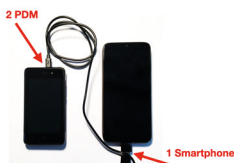

- 4 Der PDM zeigt die Meldung „Daten des PDM exportieren“ oder „PDM laden?“. > Klick auf „EXPORTIEREN“.

Warten Sie während der „Vorbereitung der Daten für den Export“

- 5 Der PDM meldet „Die Daten Ihres PDM sind für den Export bereit“. Klicken Sie auf „Beendet“

- Der PDM ist für die Übertragung der Daten auf das Telefon bereit.

- Das Symbol für das Kabel blinkt und ein

Fortschrittsbalken ist während des Teilens der Daten zu sehen. **Bitte warten.**

Achtung:

Das Kabel des Messgeräts oder des Telefons während des Teilens der Daten nicht abziehen. Wenn große Datenmengen zu teilen sind, kann die Übertragung mehrere Minuten dauern.



- 6 Die Daten der Pumpe werden auf myDiabby angezeigt! Sie können jetzt Telefon und PDM trennen

