

VERBINDINGSGIDS

Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare*



Pompgegevens delen met de myDiabby-applicatie met een telefoon

Benodigd materiaal

De **Android-smartphone** waarop de **applicatie myDiabby** is gedownload, **aangesloten** patiëntenaccount.

Een adapter om een USB-kabel aan te sluiten op de smartphone



De PDM van de Tandem t:slim x2



De USB-kabel van de Tandem t:slim x-2-pomp

Hoe gaat u te werk?

- 1 Sluit eerst **de kabel aan op de telefoon** met de adapter
- 2 Sluit **de kabel aan op de pomp**



- 3 De applicatie **myDiabby** wordt automatisch **gestart** en het delen van gegevens start op de applicatie. Indien de applicatie de toestemming vraagt voor toegang tot de USB van de telefoon, klik dan op "Toestaan" of "Accepteren".



- 4 Het **symbool van de kabel knippert** en een voortgangsbalk verschijnt tijdens het delen van gegevens. **Wacht** tot de overdracht is voltooid.

Opgelet :

Koppel de kabel niet los van de lezer of telefoon tijdens het delen van gegevens. Als er veel gegevens te delen zijn, kan de overdracht enkele minuten duren.

- 5 De **pompgegevens worden weergegeven op myDiabby!** U kunt nu de telefoon en Tandem t:slim x2 loskoppelen.



Pompgegevens delen met de myDiabby-applicatie met een computer


- 1 **Download myDiabby Uploader** voor Windows of voor Mac op de site www.mydiabby.com/uploader. Installeer myDiabby Uploader op uw computer.



myDiABBY
UPLOADER

myDiabby Uploader is een klein softwareprogramma dat op de computer moet worden geïnstalleerd om de **gegevens van bloedglucosemeters, bloedglucosesensoren en insulinepompen** te downloaden op uw account van

- 2 **Installeer myDiabby Uploader** op uw computer. Meld u aan met uw gebruikelijke gegevens van myDiabby Healthcare en volg de instructies van de software.
- 3 **Selecteer het apparaat/de apparaten** die u wilt downloaden en bevestig

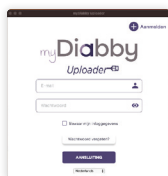


- 4 **Sluit de Tandem t:slim X2-pomp** met een USB-kabel aan op de computer.



- 5 **Klik op «Verzenden»** op myDiabby Uploader.

- 6 **De gegevens worden naar de computer gedownload.**
NB > Als er een Dexcom-sensor is aangesloten op de tandem t:slim X2-pomp, worden de continue glucosegegevens ook naar myDiabby verzonden

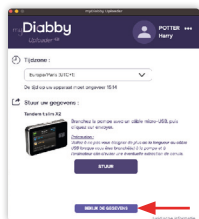

- 7 **Aan het einde van het downloaden** klikt u op «**Gegevens bekijken**» om naar het myDiabby online platform te gaan en al uw resultaten te bekijken.

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:
support@mydiabby.com of per telefoon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Élysées
75008 Paris
FRANCE

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

Document van toepassing vanaf versie 2.19 van myDiabby Healthcare



0459

GCTX2 V02D20241601NL