

GIDS VOOR AANGESLOTEN OBJECTEN

Om uw patiënten te helpen hun apparaten
te verbinden met myDiabby Healthcare



Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen met de verschillende apparaten die compatibel zijn met myDiabby Healthcare.

Deze gids is uitsluitend bestemd voor professionele zorgverleners. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare*



*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

SAMENVATTING

04 CAPILLAIRE BLOEDGLUCOSEMETERS

28 CONTINUE BLOEDGLUCOSESENSOREN

33 INSULINEPOMPEN

53 AANGESLOTEN INSULINECAPSULES
EN -PENNEN

55 MYDIABBYUPLOADER

PS : Deze verbindingsgidsen werken op dezelfde manier voor de DT1, DT2 en zwangerschapsdiabetes patiëntenaccounts



CAPILLAIRE BLOOD GLUCOSE METERS

**FORA® Diamond
MINI**



p06

Lifescan®
OneTouch Verio Flex®



p08

ONETOUCH®
Verio Reflect®



p10

ONETOUCH®
Ultra Plus Reflect®



p12

**Contour.
next®**



p14

**Contour.
nextONE®**
Blood Glucose
Monitoring System



p16

**Dinno
Premier
CareSens**



p18

my life **Unio™**
Neva



p20

ACCU-CHEK®



p22

ACCU-CHEK®
Mobile



p24

GLUCOFIX®
TECH
/ek




p26

OPMERKING



Voor patiënten die worden gecontroleerd op zwangerschapsdiabetes, moet worden opgemerkt dat zodra het bloedglucosegehalte op de myDiabby-applicatie verschijnt, het noodzakelijk is om het te koppelen aan een tijdstip. Daartoe **VINKT** u het moment van de dag af of **VERIFIEERT** u het moment van de dag zodat het resultaat op de juiste plaats in het boekje wordt geplaatst.

Vóór deze fase zijn de gegevens «in behandeling» en niet zichtbaar voor de professionele zorgverlener.

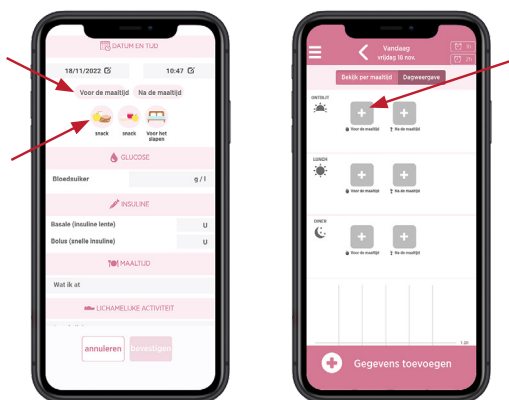

FORA DIAMOND MINI




De Fora Diamond Mini meter maakt via Bluetooth direct verbinding met de myDiabby applicatie.

Wanneer u uw bloedglucosemeter Fora Diamond Mini koppelt met de applicatie myDiabby, worden de datum en het uur automatisch ingesteld op de lezer op basis van de datum en het uur van de telefoon

Meterkoppeling

- 1 Activeer **Bluetooth** op de smartphone
- 2 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «**Mijn geconnecteerde devices**»
- 3 Selecteer «**Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan**», en selecteer vervolgens **uw lezer** in de lijst
- 4 Klik op de knop «**Ik verbind mijn lezer**»
- 5 **Activeer Bluetooth op de speler door deze aan en uit te zetten.** Om dit te doen :
 - Plaats een teststrip in de meter
 - Wacht 1 seconde totdat de meter aangaat en klaar is om uw bloedglucose te testen.
 - Haal de teststrip uit de meterDe meter gaat uit en **het blauwe lampje knippert: de Bluetooth van de meter staat aan.**

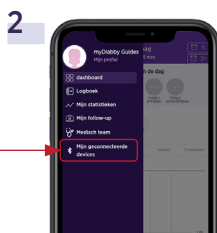


6 Op de applicatie myDiabby klikt u op de knop «Mijn lezer zoeken»

7 De meter verschijnt op het scherm. Klik op «Toevoegen».

Uw bloedglucosemeter is nu gekoppeld met uw applicatie myDiabby!


Indien u reeds gemeten gegevens wilt doorsturen met deze lezer naar myDiabby, drukt u op de knop «Mijn lezer synchroniseren»

6

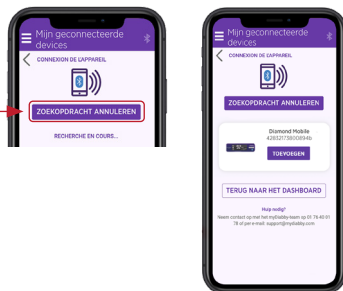

Dagelijks gebruik

1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.

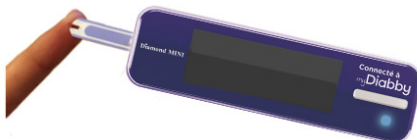

2 Zodra het resultaat van de bloedsuikerspiegel op het scherm van de lezer verschijnt, **verwijdert u het strookje uit de lezer**, vervolgens opent u de applicatie myDiabby op de telefoon in de buurt van de lezer. (Controleer of Bluetooth actief is op de smartphone)



3 Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt automatisch verstuurd naar de applicatie myDiabby!

MERK OP

- Als u op de lezer de marker voor/na maaltijd hebt aangeduid, wordt dit doorgestuurd naar myDiabby.
- Wanneer u het bloedglucosegehalte ziet op de myDiabby applicatie, kunt u andere informatie toevoegen (insulinedosis, gegeten maaltijden, opmerkingen, enz.)
- Alle bloedglucosewaarden van de meter die nog niet zijn geüpload naar de myDiabby applicatie worden in één keer overgezet.



ONETOUCH VERIO FLEX




De OneTouch Verio Flex meter maakt via Bluetooth direct verbinding met de myDiabby applicatie.

Wanneer u uw bloedglucosemeter OneTouch Verio Flex koppelt met de applicatie myDiabby, worden de datum en het uur automatisch ingesteld op de lezer op basis van de datum en het uur van de telefoon

Meterkoppeling

- 1 Activeer **Bluetooth op de smartphone**
- 2 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «**Mijn geconnecteerde devices**»

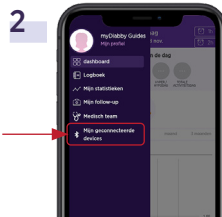

- 3 Selecteer «**Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan**», en selecteer vervolgens uw lezer in de lijst

- 4 Klik op de knop «**Ik verbind mijn lezer**»

- 5 Schakel de lezer in OneTouch Verio Flex

- 6 Activeer Bluetooth op de lezer door tegelijkertijd op de knoppen ▲ en OK te drukken. Het Bluetooth-logo ☿ verschijnt op het scherm van de lezer. (Als het Bluetooth-symbool ☿ reeds brandt op de bloedglucosemeter, kunt u rechtstreeks naar stap 6 gaan.)

- 7 Op de applicatie myDiabby klikt u op de knop “Mijn lezer zoeken”



8 De lezer verschijnt op het scherm.
Klik op “Toevoegen”

9 Geef in de applicatie de 6-cijferige
code in op het scherm van de
bloedglucosemeter, bevestig
vervolgens.




De OneTouch Verio Flex-meter is nu gekoppeld aan de myDiabby app!

Dagelijks gebruik

1 De bloedsuikerspiegel meten met de
bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.

2 Zodra het resultaat van de bloedsuikerspiegel op
het scherm van de lezer verschijnt, **verwijdt u het
strookje uit de lezer**, vervolgens opent u de applicatie
myDiabby op de telefoon in de buurt van de lezer.
(Controleer of Bluetooth actief is op de smartphone)

3 Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt
automatisch verstuurd naar de applicatie myDiabby!

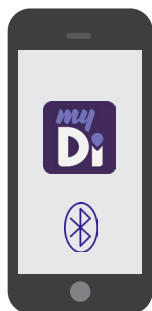

MERK OP

- Als u op de lezer de marker voor/na maaltijd hebt aangeduid, wordt dit doorgestuurd naar myDiabby.
- Wanneer u het bloedglucosegehalte ziet op de myDiabby applicatie, kunt u andere informatie toevoegen (insulinedosis, gegeten maaltijden, opmerkingen, enz.)
- Alle bloedglucosewaarden van de meter die nog niet zijn geüpload naar de myDiabby applicatie worden in één keer overgezet.

ONETOUCH VERIO REFLECT



De OneTouch Verio Reflect meter maakt via Bluetooth direct verbinding met de myDiabby applicatie.

Wanneer u uw bloedglucosemeter OneTouch Verio Reflect koppelt met de applicatie myDiabby, worden de datum en het uur automatisch ingesteld op de lezer op basis van de datum en het uur van de telefoon

Meterkoppeling

1 Activeer **Bluetooth op de smartphone**

2 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

3 Selecteer «Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan», en selecteer vervolgens uw lezer in de lijst


4 Klik op de knop «Ik verbind mijn lezer»

5 Schakel de lezer in in de lijst

6 Activeer Bluetooth op de lezer:

- Kies in het menu van de lezer «Instellingen», vervolgens «Bluetooth».
- Selecteer «Geactiveerd»
- Druk op de terug-knop (pijlte naar links) om terug te keren naar het openingsscherm van de lezer
- Het symbool  (Bluetooth) brandt rechts bovenaan op het scherm van de lezer

7 Op de applicatie myDiabby. Klikk u op de knop “Mijn lezer zoeken”

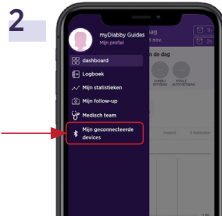

8 De lezer verschijnt op het scherm. Klik op “**Toevoegen**”

9 Geef in de applicatie de 6-cijferige code in op het scherm van de bloedglucosemeter, bevestig vervolgens.




De OneTouch Verio Reflect-meter is nu gekoppeld aan de myDiabby app!

Dagelijks gebruik

1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.

2 Zodra het resultaat van de bloedsuikerspiegel op het scherm van de lezer verschijnt, **verwijdt u het strookje uit de lezer**, vervolgens opent u de applicatie myDiabby op de telefoon in de buurt van de lezer. (Controleer of Bluetooth actief is op de smartphone)

3 Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt automatisch verstuurd naar de applicatie myDiabby!

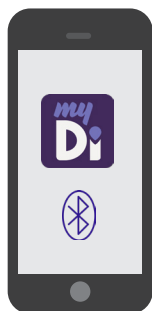

MERK OP

- Als u op de lezer de marker voor/na maaltijd hebt aangeduid, wordt dit doorgestuurd naar myDiabby.
- Wanneer u het bloedglucosegehalte ziet op de myDiabby applicatie, kunt u andere informatie toevoegen (insulinedosis, gegeten maaltijden, opmerkingen, enz.)
- Alle bloedglucosewaarden van de meter die nog niet zijn geüpload naar de myDiabby applicatie worden in één keer overgezet.

ONETOUCH ULTRA PLUS REFLECT



De OneTouch Ultra PLUS Reflect meter maakt via Bluetooth direct verbinding met de myDiabby applicatie.

Wanneer u uw bloedglucosemeter OneTouch Ultra Plus Reflect koppelt met de applicatie myDiabby, worden de datum en het uur automatisch ingesteld op de lezer op basis van de datum en het uur van de telefoon

Meterkoppeling

1 Activeer **Bluetooth op de smartphone**

2 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

3 Selecteer «Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan», en selecteer vervolgens uw lezer in de lijst


4 Klik op de knop «Ik verbind mijn lezer»

5 Schakel de lezer in OneTouch Ultra Plus Reflect

6 Activeer Bluetooth op de lezer:

- Kies in het menu van de lezer «Instellingen», vervolgens «Bluetooth».
- Selecteer «Geactiveerd»
- Druk op de terug-knop (pijlte naar links) om terug te keren naar het openingsscherm van de lezer
- Het symbool  (Bluetooth) brandt rechts bovenaan op het scherm van de lezer

7 Op de applicatie myDiabby. Kijkt u op de knop “Mijn lezer zoeken”

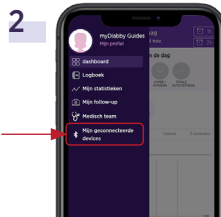

8 De lezer verschijnt op het scherm. Klik op “**Toevoegen**”

9 Geef in de applicatie de 6-cijferige code in op het scherm van de bloedglucosemeter, bevestig vervolgens.




De OneTouch Ultra Plus Reflect-meter is nu gekoppeld aan de myDiabby app!

Dagelijks gebruik

1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.

2 Zodra het resultaat van de bloedsuikerspiegel op het scherm van de lezer verschijnt, **verwijdt u het strookje uit de lezer**, vervolgens opent u de applicatie myDiabby op de telefoon in de buurt van de lezer. (Controleer of Bluetooth actief is op de smartphone)

3 Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt automatisch verstuurd naar de applicatie myDiabby!

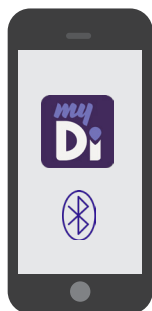

MERK OP

- Als u op de lezer de marker voor/na maaltijd hebt aangeduid, wordt dit doorgestuurd naar myDiabby.
- Wanneer u het bloedglucosegehalte ziet op de myDiabby applicatie, kunt u andere informatie toevoegen (insulinedosis, gegeten maaltijden, opmerkingen, enz.)
- Alle bloedglucosewaarden van de meter die nog niet zijn geüpload naar de myDiabby applicatie worden in één keer overgezet.

CONTOUR NEXT




De Contour Next meter maakt via Bluetooth direct verbinding met de myDiabby applicatie.

Meterkoppeling

 Alvorens te starten, controleert u of de bloedglucosemeter is ingesteld op **dezelfde datum en hetzelfde uur als de telefoon**. Zo niet, stel deze dan in volgens de gebruikshandleiding van de lezer.

1 Activeer **Bluetooth** op de smartphone

2 Meld u aan op de **applicatie myDiabby** en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

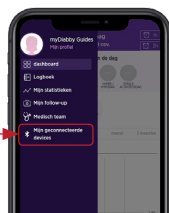

3 Schakel de lezer Contour Next in door lang op de OK-knop te drukken.



4 Activeer Bluetooth op de lezer door lang op de knop  te drukken. Het Bluetooth-logo  verschijnt op het scherm van de lezer.

5 Op de **applicatie myDiabby** klikt u op de knop «Ik verbind mijn capillaire bloedglucosemeter», vervolgens op «ASCENSIA Contour NEXT».



6 Klik op de knop «Ik verbind mijn lezer»




7 Geef in de applicatie de 6-cijferige code in op het scherm van de bloedglucosemeter, bevestig vervolgens.



- 8 De lezer verschijnt op het scherm.
Klik op “**Toevoegen**”

Uw bloedglucosemeter is nu gekoppeld met uw applicatie myDiabby!

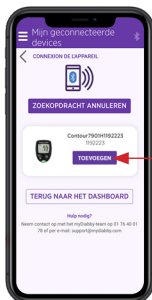

8


Dagelijks gebruik

- 1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.
- 2 Zodra het resultaat van de bloedsuikerspiegel op het scherm van de lezer verschijnt, verwijdert u het strookje uit de lezer, vervolgens opent u de applicatie myDiabby op de telefoon in de buurt van de lezer. (Controleer of Bluetooth actief is op de smartphone)




- 3 Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt automatisch verstuurd naar de applicatie myDiabby!

Als u de maaltijd of het tijdstip van de dag overeenkomstig met deze bloedsuikerspiegel moet wijzigen, kunt u daarop klikken en de overeenkomstige informatie aangeven.

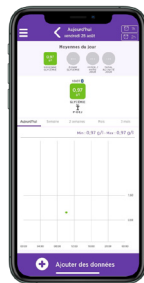

MERK OP

- Als u op de lezer de marker voor/na maaltijd hebt aangeduid, wordt dit doorgestuurd naar myDiabby.
- Wanneer u het bloedglucosegehalte ziet op de myDiabby applicatie, kunt u andere informatie toevoegen (insulinedosis, gegeten maaltijden, opmerkingen, enz.)
- Alle bloedglucosewaarden van de meter die nog niet zijn geüpload naar de myDiabby applicatie worden in één keer overgezet.

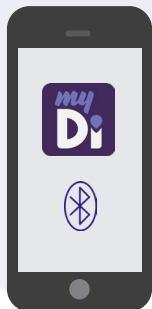

CONTOUR NEXT ONE




De Contour Next One meter maakt via Bluetooth direct verbinding met de myDiabby applicatie.

Meterkoppeling

 Zorg ervoor dat de bloedglucosemeter is ingesteld op de juiste datum en het juiste uur om de connectiviteit met de applicatie myDiabby te gebruiken.

1 Activeer **Bluetooth** op de smartphone

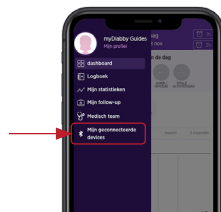

2

2 Meld u aan op de applicatie **myDiabby** en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

3 Activeer **Bluetooth** op uw bloedglucosemeter
Contour next ONE: **Druk** daarvoor op de **OK-knop** en houd deze **ingedrukt** tot het **BLAUWE controlelampje knippert op de lezer** en het Bluetooth-symbool  brandt op het scherm van de lezer.




3

4 Klik op de knop «Ik verbind mijn lezer», vervolgens op «Mijn lezer zoeken» om de koppeling te starten.



4

5 De lezer verschijnt op het scherm. Klik op «Toevoegen»

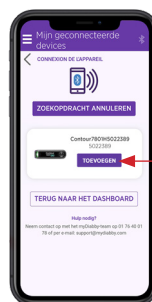

5

Uw bloedglucosemeter is nu gekoppeld met uw applicatie myDiabby!

Dagelijks gebruik

- 1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.



- 2 Wanneer de bloedsuikerspiegel op het scherm van de bloedglucosemeter wordt getoond, geeft het Bluetooth-symbool aan dat de lezer klaar is om het resultaat naar de applicatie myDiabby te sturen.


- 3 Controleer of **Bluetooth geactiveerd is op de smartphone**, en **open de applicatie myDiabby**, naast de lezer die nog steeds ingeschakeld is.



- 4 Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt automatisch verstuurd naar de applicatie myDiabby!

Als u de maaltijd of het tijdstip van de dag overeenkomstig met deze bloedsuikerspiegel moet wijzigen, kunt u daarop klikken en de overeenkomstige informatie aangeven.

MERK OP

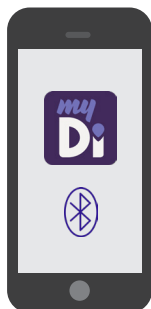

- Als u op de lezer de marker voor/na maaltijd hebt aangeduid, wordt dit doorgestuurd naar myDiabby.
- Wanneer u het bloedglucosegehalte ziet op de myDiabby applicatie, kunt u andere informatie toevoegen (insulinedosis, gegeten maaltijden, opmerkingen, enz.)
- Alle bloedglucosewaarden van de meter die nog niet zijn geüpload naar de myDiabby applicatie worden in één keer overgezet.

DINNO PREMIER CARESENS



De Dinno Premier Caresens meter maakt via Bluetooth direct verbinding met de myDiabby applicatie.

Meterkoppeling

 Zorg ervoor dat de bloedglucosemeter is ingesteld op de juiste datum en het juiste uur om de connectiviteit met de applicatie myDiabby te gebruiken.

1 Activeer **Bluetooth** op de smartphone


2 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

3 Selecteer «Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan», en selecteer vervolgens uw lezer in de lijst

4 Klik op de knop «Ik verbind mijn lezer»

5 Zet de bloedglucosemeter in koppelingsmodus. Doe dit als volgt:

- Schakel de bloedglucosemeter in met de **S-knop**
- Druk lang op de **S-knop** tot «SET» verschijnt op het scherm van de lezer
- Druk op de knop **▶** om «Yes» te zien links onderaan op het scherm, druk vervolgens op de **S-knop**
- «bT» verschijnt op het scherm van de lezer. Druk driemaal **▶** op om «PAIR» te zien verschijnen rechts onderaan op het scherm van de lezer. Druk vervolgens op de **S-knop**.
- Het woord «Pin» verschijnt op het scherm van de lezer.


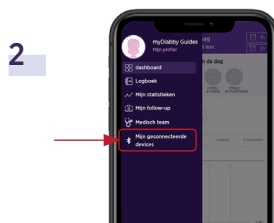


- 6 Op de applicatie myDiabby.
Klikt u op de knop “Mijn lezer zoeken”

- 7 Geef in de applicatie de 6-cijferige
code in op het scherm van de
bloedglucosemeter, bevestig vervolgens.

De lezer verschijnt op het scherm.
Klik op
“Toevoegen”

- 8 De Dinno Premier Caresens-meter is nu gekoppeld
aan de myDiabby app!

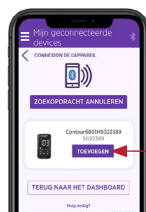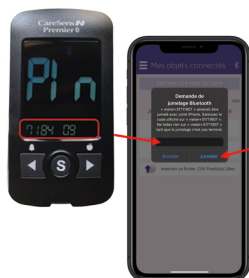

Dagelijks gebruik

- 1 De bloedsuikerspiegel meten met de
bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.
- 2 Zodra het resultaat van de bloedsuikerspiegel op
het scherm van de lezer verschijnt, **verwijdt u het
strookje uit de lezer**, vervolgens opent u de applicatie
myDiabby op de telefoon in de buurt van de lezer.
- 3 Open de applicatie **myDiabby** in de buurt van de bloedglucosemeter.
(Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op de smartphone).
- 4 Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt automatisch verstuurd
naar de applicatie myDiabby!



MERK OP

- Als u op de lezer de marker voor/na maaltijd hebt aangeduid, wordt dit doorgestuurd naar myDiabby.
- Wanneer u het bloedglucosegehalte ziet op de myDiabby applicatie, kunt u andere informatie toevoegen (insulinedosis, gegeten maaltijden, opmerkingen, enz.)
- Alle bloedglucosewaarden van de meter die nog niet zijn geüpload naar de myDiabby applicatie worden in één keer overgezet.

MYLIFE UNIO NEVA



Om gegevens van de Unio Neva meter te delen op myDiabby Healthcare, moet u de mylife App gebruiken.

Koppeling van de lezer met de applicatie myDiabby


- 1** Download de **2 applicaties myDiabby en mylife** op de telefoon.

Meld u aan op elk van de 2 applicaties. Met de applicatie mylife kunt u gegevens van de bloedglucosemeter Unio Neva verzamelen. Mylife zal de gegevens vervolgens automatisch versturen naar myDiabby, dit is de toepassing waarmee u een verbinding kunt maken met het medisch apparaat.




- 2** Sluit via Bluetooth de bloedglucosemeter Unio Neva aan op de applicatie mylife door de gids op de lezer te volgen.

- 3** Meld u aan op de **applicatie myDiabby** en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

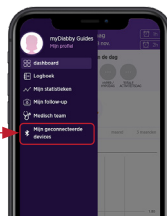



- 4** Selecteer «Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan», vervolgens «MYLIFE Unio». Klik op de knop «Mijn gezondheidsapplicatie verbinden».

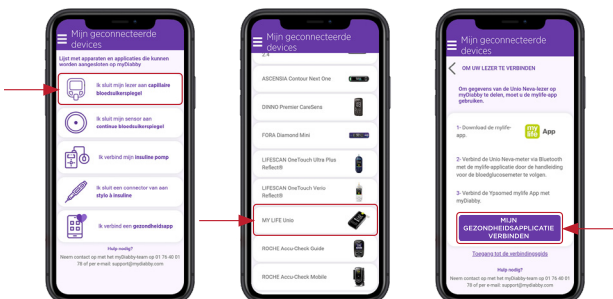

- 5 Geef de **aanmeldgegevens van de mylife-account** in, **bevestig** vervolgens.



- 6 De gegevens van Mylife Unio Neva worden nu gedeeld in de applicatie myDiabby!

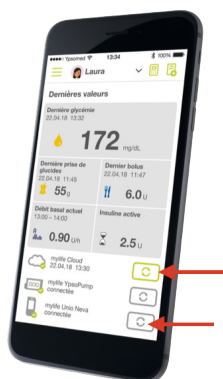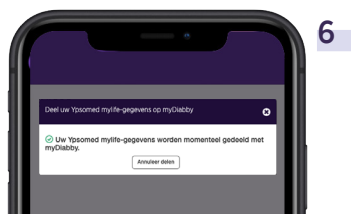

MERK OP

- Alle gegevens die manueel of via Bluetooth zijn ingegeven in de applicatie mylife worden gedeeld met de applicatie myDiabby (pompgegevens, bloedsuikerspiegel, maaltijden, enz.)
- Zodra de Mylife- en myDiabby Healthcare-accounts zijn gekoppeld, worden er regelmatig automatisch gegevens verzonden. Deze verzending kan leiden tot een vertraging tussen de synchronisatie van gegevens op Mylife en de weergave ervan op myDiabby Healthcare.

ACCU-CHECK GUIDE



Meterkoppeling

 Zorg ervoor dat de bloedglucosemeter is ingesteld op de juiste datum en het juiste uur om de connectiviteit met de applicatie myDiabby te gebruiken.

1 Activeer **Bluetooth** op de smartphone



2 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

3 Selecteer «Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan», en selecteer vervolgens uw lezer in de lijst

4 Klik op de knop «Ik verbind mijn lezer»

5 Zet de bloedglucosemeter in koppelingsmodus. Doe dit als volgt:

- Schakel de bloedglucosemeter in met de **OK**-knop.
- Ga in het menu van de lezer naar «**Instellingen**», vervolgens «**Draadloos**»
- Op de vraag «Geen enkel apparaat verbonden. Verbinding maken?» antwoordt u **JA**.
- **Er verschijnt een 6-cijferige pincode** op het scherm van de lezer.

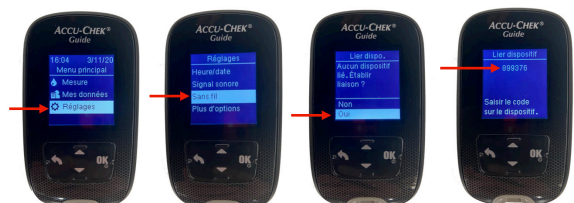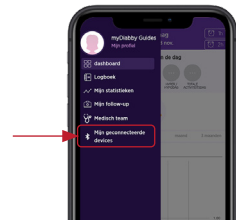

- 6 Op de applicatie myDiabby.
Klikt u op de knop “Mijn lezer zoeken”



- 7 Geef in de applicatie de 6-cijferige code in op het scherm van de bloedglucosemeter, bevestig vervolgens.



- 8 De lezer verschijnt op het scherm.
Klik op “Toevoegen”



Dagelijks gebruik

- 1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.
- 2 Zodra het resultaat van de bloedsuikerspiegel op het scherm van de lezer verschijnt, **verwijdert u het strookje uit de lezer**, vervolgens opent u de applicatie myDiabby op de telefoon in de buurt van de lezer.
- 3 **Open de applicatie myDiabby** in de buurt van de bloedglucosemeter.
(Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op de smartphone).
- 4 Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt automatisch verstuurd naar de applicatie myDiabby!

ACCU-CHECK MOBILE




Meterkoppeling

-  Zorg ervoor dat de bloedglucosemeter is ingesteld op de juiste datum en het juiste uur om de connectiviteit met de applicatie myDiabby te gebruiken.

- 1** Noteer op een papier het serienummer van de Bluetooth-adapter



- 2** Activeer Bluetooth op de smartphone

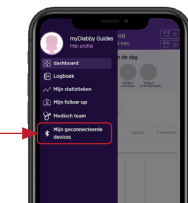

- 3** Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»



- 4** Selecteer «Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan», en selecteer vervolgens uw lezer in de lijst



- 5** Klik op de knop «Ik verbind mijn lezer»



- 6** Sluit de Bluetooth-adapter aan op de bloedglucosemeter Accu-Chek Mobile

- 7** Schakel de Bluetooth-adapter in door op de zijknop te drukken. Hierdoor wordt de bloedglucosemeter ingeschakeld en gaat deze naar «koppelingsmodus», en knippert de adapter groen.



- 8 Op de applicatie myDiabby.
Klikt u op de knop “Mijn lezer zoeken”



8

- 9 Voer in de applicatie het 6-cijferige
serienummer van de adapter in,
dat u genoteerd hebt, en bevestig
vervolgens.



9

- 10 De lezer verschijnt op het scherm.
Klik op “Toevoegen”

Uw bloedglucosemeter is nu gekoppeld met
uw applicatie myDiabby!



10

Dagelijks gebruik

- 1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.
- 2 Zodra het resultaat van de bloedsuikerspiegel op het scherm verschijnt,
schakelt u de Bluetooth van de adapter in met de zijknop.
- 3 **Open de applicatie myDiabby** in de buurt van de bloedglucosemeter.
(Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op de smartphone).
- 4 Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt
automatisch verstuurd naar de applicatie myDiabby!

GLUCOFIX® TECH / GLUCOFIX® TECH 2K



NFC-verbinding

De gegevensoverdracht gebeurt via de NFC-antenne door de lezer dicht bij uw smartphone te brengen.

- 1 Zorg ervoor dat de bloedglucosemeter is ingesteld op de juiste datum en het juiste uur om de connectiviteit met de applicatie myDiabby te gebruiken.

- 2 **Activeer de NFC op uw smartphone** (in de instellingen)

op sommige smartphones is NFC standaard geactiveerd en kan het niet worden uitgeschakeld


- 3 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

- 4 Selecteer «Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan», en selecteer vervolgens uw lezer in de lijst

- 5 Klik op de knop « Ik verbind mijn lezer »

- 6 Activeer NFC op de lezer. Om dit te doen:

- 1 **Open het parametermenu van de speler:** druk tegelijkertijd 4 seconden op de **toetsen M (aan/uit)** en **A**.
- 2 **Druk op de **A** toets**, een N knippert.
- 3 Druk op de **M-toets**, «Off» verschijnt.
- 4 Druk op **toets A**, «On» verschijnt.
- 5 Druk op de **M-toets**, «SET» verschijnt, **de NFC is geactiveerd op uw lezer.**
- 6 **Zet de meter uit:** druk 3 seconden op de M-toets

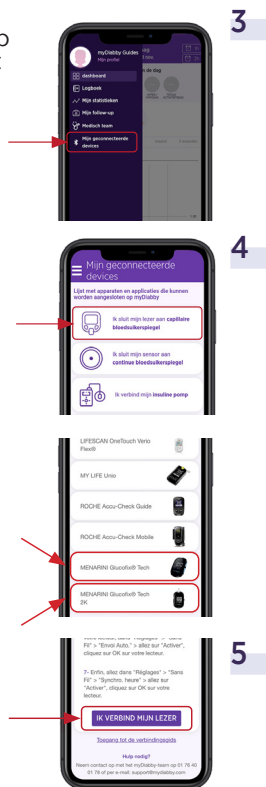

7 Het zoeken is bezig:

- Bij Android **brengt u de lezer naar de NFC-chip op uw smartphone.**
- Op de iPhone **brengt u de lezer dicht bij de NFC-chip.**
Uw iPhone gaat dan trillen zodra de lezer is gedetecteerd en er verschijnt een bevestiging op het scherm.

Dagelijks gebruik

1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.

2 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

3 Bij de lezer die u hebt aangesloten, drukt u op «Synchroniseren»



4 Het zoeken is bezig:

- Bij Android **brengt u de lezer naar de NFC-chip op uw smartphone.**
- Op de iPhone **brengt u de lezer dicht bij de NFC-chip.**
Uw iPhone gaat dan trillen zodra de lezer is gedetecteerd en er verschijnt een bevestiging op het scherm.



CONTINUE BLOEDGLUCOSESENSOREN




FREESTYLE LIBRE



Als u de **FreeStyle LibreLink** of **LibreView** toepassing gebruikt, ga dan direct naar stap 3.

- 1 **Maak hier een LibreView-account aan:**
www.libreview.com/auth/register
- 2 **Upload** de gegevens van uw FreeStyle Libre reader naar uw LibreView account met behulp van een computer en de gele USB-kabel die bij de reader is geleverd.
Hulp nodig bij het downloaden van gegevens naar LibreView?
Ga naar : pat.libreview.io/support
- 3 **Meld u aan op uw myDiabby-account** vanaf een computer **OF** de mobiele applicatie.
- 4 Klik op het tabblad «**Mijn geconnecteerde devices**», vervolgens op «**Ik verbind mijn bloedsuikerspiegel sensor continu**».

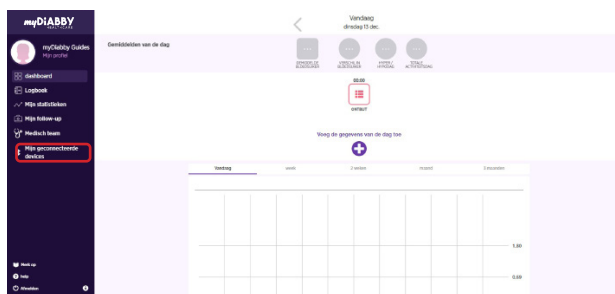

- 5 Selecteer de knop **FreeStyle Libre**



6 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw FreeStyle LibreLink / LibreView-account in.


Lees de gebruiksvoorwaarden en klik vervolgens op «**Autoriseer**» om het delen van gegevens te accepteren.

7 Dit bericht verschijnt op het scherm en bevestigt dat het LibreView account verbonden is met myDiabby Healthcare.

Klik op «**Terug**» om terug te keren naar myDiabby Healthcare.



Uw continue glucose gegevens worden nu gedeeld op myDiabby Healthcare!

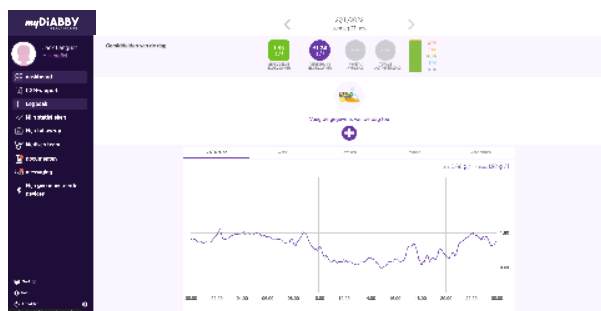

MERK OP

Upload regelmatig gegevens van de FreeStyle Libre sensor naar LibreView zodat het medische team de resultaten kan zien op myDiabby Healthcare.

> Zodra LibreView en myDiabby verbonden zijn, stuurt LibreView automatisch continue glucosegegevens naar myDiabby Healthcare zodra deze beschikbaar zijn. Dit kan een vertraging van enkele minuten veroorzaken tussen het laden van de gegevens in LibreView en het weergegeven ervan op myDiabby Healthcare.

> Als u gegevens van uw FreeStyle Libre meter op myDiabby Healthcare wilt ophalen met een andere methode, raadpleeg dan ons helpcentrum: help.diabby.com

Goed gebruiksdokument voor patiënten die deze medische hulpmiddelen gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleidingen voor FreeStyle Libre 2, FreeStyle LibreLink en LibreView: <https://www.diabetescare.abbott/support/manuals/fr.html>
De sensorbehuizing, FreeStyle, Libre en aanverwante merken zijn handelsmerken van Abbott en worden met toestemming gebruikt.

DEXCOM CLARITY




Als u gegevens van een Dexcom G6, G7, One+ of One-sensor wilt delen, moet u de **Dexcom Clarity**-software gebruiken:

- 1 - Sensorgegevens worden opgehaald door de Dexcom Clarity-software
- 2 - Dexcom Clarity stuurt de resultaten automatisch naar de myDiabby-account

DE STAPPEN


- 1 **Maak een Dexcom Clarity-account** aan via deze site:
<https://uam2.dexcom.com//index.html#/register>

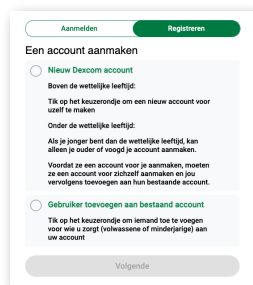


- 2 **Download de Dexcom Clarity Uploader van deze pagina:**
<https://clarity.dexcom.eu/?locale=fr-FR#/home-user-upload>
Download vervolgens de gegevens van de sensor naar Dexcom Clarity door de instructies op het scherm te volgen.



- 3 **Meld u aan op uw myDiabby Healthcare-account** vanaf een computer **OF** de mobiele applicatie.

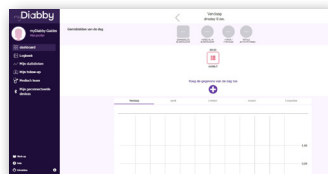


- 4 **Klik op het tabblad «Mijn geconnecteerde devices», vervolgens op «Ik verbind mijn bloedsuikerspiegelsensor continu».**

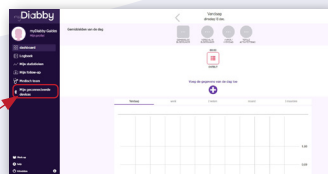


- 5 Kies de **Dexcom**-knop, klik vervolgens op de knop «**MIJN GEZONDHEIDSDAPPLICATIE VERBINDEN**»




5

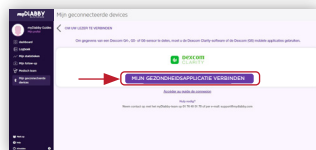

- 6 Geef **de gegevens en het wachtwoord van uw Dexcom-account** in. Lees de gebruiksvoorwaarden, voer **vervolgens uw naam in** en klik op “**Toestaan**” om te accepteren.

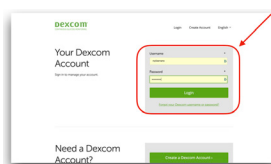

6

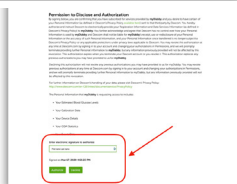


- 7 Dit bericht verschijnt op het scherm en bevestigt dat uw **Dexcom-account verbonden is met myDiabby Healthcare**. Klik op “**Terug**” om terug te keren naar myDiabby.



7

De continue bloedsuikerspiegelgegevens worden nu gedeeld in de applicatie myDiabby Healthcare!

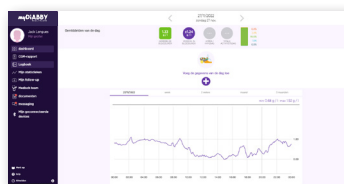

MERK OP

Download de Dexcom-sensorgegevens regelmatig naar Dexcom Clarity zodat het medisch team de resultaten kan zien op myDiabby Healthcare.

> Zodra de **Dexcom**- en **myDiabby Healthcare**-accounts zijn gekoppeld, worden er regelmatig automatisch gegevens verzonden. De weergegeven gegevens lopen **3 uur** achter op de laatst beschikbare gegevens.

> Indien u een Dexcom G6 gebruikt in combinatie met de t:slim X2 Tandem insulinepomp, volstaat het dat u de pomp uploadt naar myDiabby om de Tandem + G6 pompgegevens op myDiabby Healthcare te laten verschijnen.


INSULINE PUMP

omnipod®
INSULIN MANAGEMENT SYSTEM



p34

my life YpsoPump®

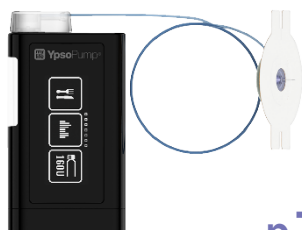

p37

Medtronic

MiniMed 780G
740G



p39


Medtronic

MiniMed 640G



p43

t:slim X2™
TANDEM®
DIABETES CARE

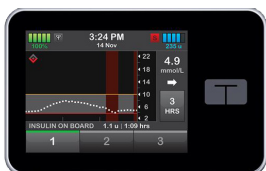

p46

Medtrum



p49

INSULET OMNIPOD



Methode 1 :

Het delen van Omnipod op myDiabby via de computer

Om de gegevens van **Omnipod te recupereren**, moet u ze **downloaden met de software myDiabby Uploader**.




myDiABBY
UPLOADER

MyDiabby Uploader is een klein softwareprogramma dat op de computer moet worden geïnstalleerd om de gegevens van bloedglucosemeters, bloedglucosesensoren en insulinepompen te downloaden op uw account van myDiabby Healthcare.

Zie **pagina 51** voor een **handleiding voor myDiabby Uploader** op Windows of Mac.

Methode 2 :

Pompgegevens delen met de myDiabby applicatie met een telefoon

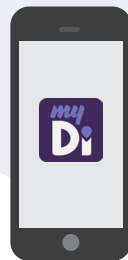

Matériel nécessaire

De **Android-smartphone** waarop de **applicatie myDiabby** is gedownload, **aangesloten** patiëntenaccount.



De PDM van de Omnipod

Een adapter om een USB-kabel aan te sluiten op de smartphone




De USB-kabel van de Omnipod-pomp

Merk op : Het myDiabby-team verstrekt gratis adapters aan medische teams om uit te delen aan hun patiënten als onderdeel van de zorg op myDiabby Healthcare.

Hoe gaat u te werk?


- 1 Open de **myDiabby-applicatie** op uw telefoon en meld u aan met uw inloggegevens
- 2 Sluit **eerst de kabel aan op de telefoon** met de adapter
- 3 **Ontgrendel uw PDM Dash** (met uw pincode). Sluit **vervolgens de kabel aan op de PDM Dash**
- 4 In de PDM verschijnt de melding «PDM-gegevens exporteren» of «PDM laden?» > Klik op «EXPORTEREN». **Wacht** tot «Bestanden voorbereiden voor export» is voltooid

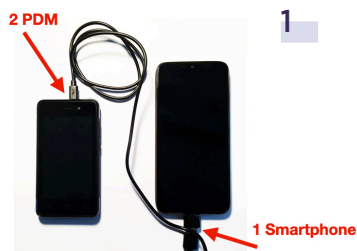

5 De PDM zegt «Uw PDM-gegevens zijn klaar om te worden geëxporteerd».

Klik op «Klaar».

- De PDM is klaar voor gegevensoverdracht naar de telefoon.
- Het symbool van de kabel knippert en een voortgangsbalk verschijnt tijdens het delen van gegevens. **Wacht even.**

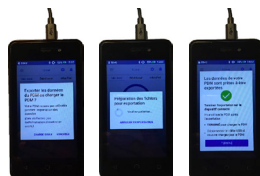

5

Opgelet :

Koppel de kabel niet los van de lezer of telefoon tijdens het delen van gegevens. Als er veel gegevens te delen zijn, kan de overdracht enkele minuten duren.



6 De pompgegevens worden weergegeven op myDiabby!

U kunt nu de telefoon en Omnipod loskoppelen.

DINGEN OM TE CONTROLEREN ALS JE DE OVERDRACHT NIET KUNT MAKEN

- Controleer bij het openen van de myDiabby applicatie of u bent ingelogd op uw account: als u bent ingelogd, komt u op het dashboard. Als u niet bent ingelogd, moet u uw e-mail en wachtwoord invoeren.
- Zorg ervoor dat u eerst de telefoon aansluit en daarna de PDM.
- Sluit de PDM aan, deze moet oplichten, een pieptoon laten horen en een bericht tonen dat begint met «USB-apparaat gedetecteerd».
- Als de aansluitingen een beetje bewegen, wees dan voorzichtig dat u niets aanraakt tijdens het iets aanraken tijdens de overdracht



MYLIFE YPSOPUMP




Om gegevens van de Unio Neva meter te delen op myDiabby Healthcare, moet u de mylife App gebruiken.

- Download de **2 applicaties myDiabby en mylife** op de telefoon.
Meld u aan op elk van de 2 applicaties.
Met de applicatie mylife kunt u gegevens van de Ypsopump-insulinepomp verzamelen. Mylife zal de gegevens vervolgens automatisch versturen naar myDiabby Healthcare, die de toepassing is waarmee u een verbinding kunt maken met het medisch apparaat.




- Verbind de Ypsopump-pomp via Bluetooth met de mylife-applicatie door de insulinepompgids te volgen.


- Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

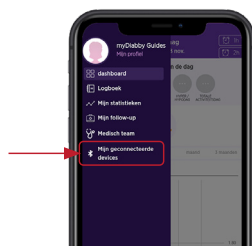



- Selecteer «Ik sluit mijn insulinepomp aan», dan «Ypsopump». Klik op de knop «Mijn gezondheidsapplicatie verbinden».

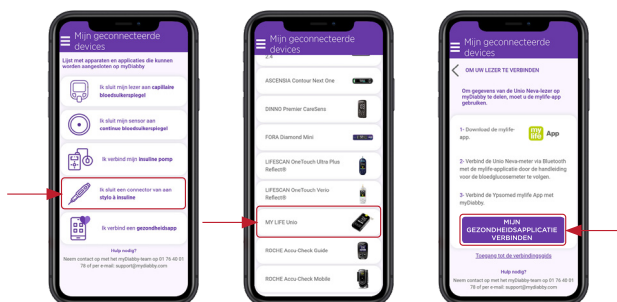

- 5 Geef de **aanmeldgegevens van de mylife-account** in, **bevestig** vervolgens.

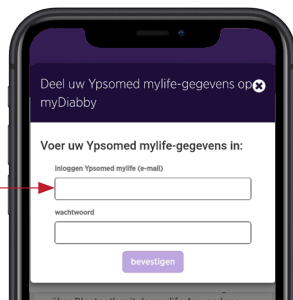

- 6 De gegevens van Mylife Ypsopump worden nu gedeeld in de applicatie myDiabby!

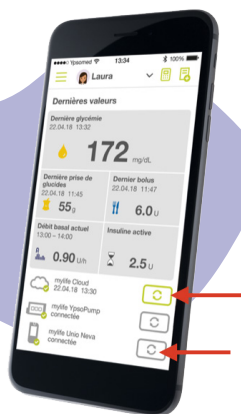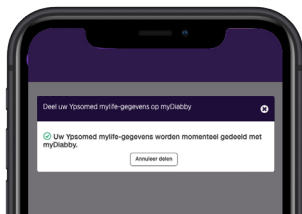

MERK OP

- Alle gegevens die manueel of via Bluetooth zijn ingegeven in de applicatie mylife worden gedeeld met de applicatie myDiabby (pompgegevens, bloedsuikerspiegel, maaltijden, enz.)
- Zodra de Mylife- en myDiabby Healthcare-accounts zijn gekoppeld, worden er regelmatig automatisch gegevens verzonden. Deze verzending kan leiden tot een vertraging tussen de synchronisatie van gegevens op Mylife en de weergave ervan op myDiabby Healthcare.

MEDTRONIC

MINIMED 780G + 740G




Fase 1 : Pompgegevens op het CareLink-platform zetten

- Als u uw pomp gebruikt met de **MiniMed Mobile**-applicatie, worden uw gegevens automatisch opgeslagen op **CareLink**.



- Als u de applicatie niet gebruikt, **downloadt u de pompgegevens van CareLink met de reader die bij de pomp hoort**. Meer informatie op: carelink.minimed.eu/app/install-uploader

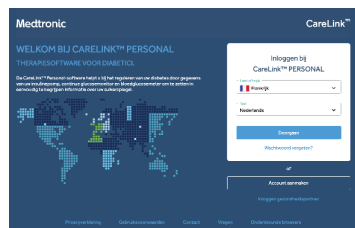

Fase 2 : CareLink gegevens delen op myDiab- by Healthcare

Methode 2 :

Uw Carelink account koppelen aan uw myDiabby Healthcare account

Depuis le navigateur internet d'un ordinateur
OU d'un smartphone:


- 1 Open de **myDiabby** applicatie (op smartphone OF computer) en klik op het tabblad «**Mijn geconnecteerde devices**».
- 2 Klik op de categorie «Ik sluit een gezondheidstoepassing aan»
- 3 Selecteer «**CareLink**» in de lijst met compatibele toepassingen.



Ik verbind een **gezondheidsapp**


CareLink™

- 4 Geef uw **CareLink-ID** op in het speciale pop-upvenster. Dit is dezelfde login die u gebruikt om verbinding te maken met CareLink of de **MiniMed Mobile**-toepassing.

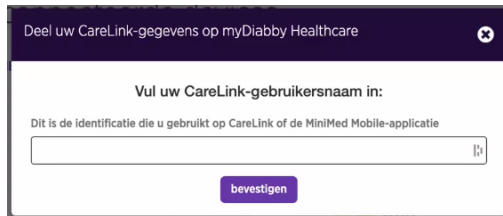


- 5 Ga naar uw **CareLink-account** om het delen te accepteren door op de link in de pop-up te klikken of via de automatische e-mail die u hebt ontvangen.

Delen met kliniek

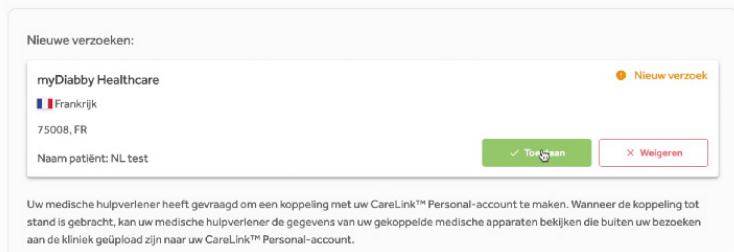

- 6 Zodra u het delen heeft geaccepteerd, **gaat u terug naar uw myDiabby Healthcare account en de gegevens worden nu automatisch gedeeld!**

Het kan een paar minuten duren voordat de gegevens worden opgehaald als je voor de eerste keer inlogt.

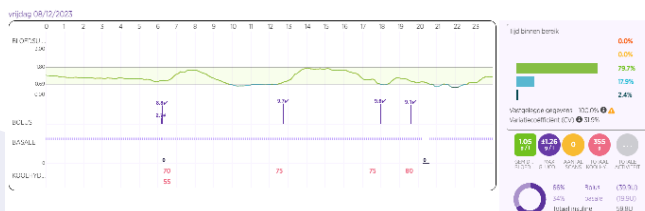

OPMERKINGEN

Alle CareLink-gegevens worden gedeeld op myDiabby Healthcare wanneer ze worden gedeeld: continue glucosegegevens, capillaire bloedglucosewaarden, basaal, bolus, koolhydraten, pompinformatie, enz.

Méthode 2 :

Gegevens handmatig herstellen van CareLink


Vanuit de webbrowser op een computer OF een smartphone:

- 1 Ga naar carelink.minimed.com en maak verbinding met de patiëntenaccount met dezelfde identificaties als voor de **MiniMed Mobile**-applicatie, of rechtstreeks met de identificaties van **CareLink**.



- 2 Klik op de CareLink-website op :
 - Het tabblad «**Rapporten**» linksboven (pictogram met curve)

- Dan, onderaan de pagina, «**Gegevens exporteren (CSV)**».

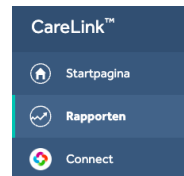


> Een .csv-bestand met de pompresultaten wordt opgeslagen op de telefoon of computer.

- 3 Open de myDiabby applicatie (op smartphone OF computer) en klik op «**Gegevens toevoegen**».



- 4 Scroll naar de onderkant van het scherm en klik op «**Een .csv-bestand importeren**» en vervolgens op «**Een CareLink .csv-bestand importeren**».

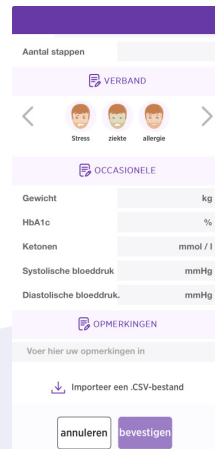

5 Selecteer het .csv-bestand dat is opgeslagen op uw telefoon of computer van de CareLink-site

6 Resultaten van de MiniMed 780G of 740G-pomp en de bijbehorende sensor worden nu gedeeld op de myDiabby-toepassing !



OPMERKINGEN

Alle CareLink-gegevens worden gedeeld op myDiabby Healthcare wanneer ze worden gedeeld: continue glucosegegevens, capillaire bloedglucosewaarden, basaal, bolus, koolhydraten, pompinformatie, enz.

MEDTRONIC

630G, 640G, 670G, 523, 723, VEO, 530G



Om de gegevens van Medtronic te recupereren, moet u ze downloaden met de software myDiabby Uploader.



myDiABBY
UPLOADER

myDiabby Uploader is een softwareprogramma dat op de computer moet worden geïnstalleerd om de gegevens van bloedglucosemeters, bloedglucosesensoren en insulinepompen te downloaden op uw account van myDiabby Healthcare.

1 - Voordat u begint, moet u :


- Maak uw myDiabby account aan
- Insulinepompen
- **Contour Next Link Meter** (voor 523, 723, Veo en 530G pompen) 530G pompen) OF **Contour Next Link 2.4 Meter** (voor 630G, 640G, 670G pompen)

2 - U kunt nu de myDiabby Uploader software downloaden :


Zie **pagina 55** voor een **handleiding voor myDiabby Uploader** op Windows of Mac.

Zodra u de myDiabby Uploader software hebt gedownload en geïnstalleerd, volgt u deze stappen:

- 1 **Meld u aan met uw gebruikelijke gegevens van myDiabby Healthcare** en volg de instructies van de software.

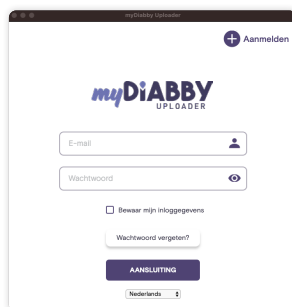


- 2 **Selecteer het apparaat/de apparaten die u wilt downloaden en bevestig**

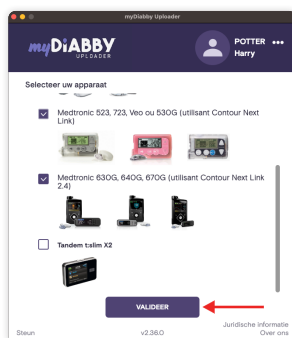


- 3 Indien de insulinepomp en de Contour Next Link 2.4-lezer zijn aangesloten, vink dan het vakje «**De meter en de pomp zijn gekoppeld**» aan.

Indien de insulinepomp en de Contour Next Link 2.4-lezer niet zijn aangesloten, **verwijder dan het vinkje bij «De meter en de pomp zijn gekoppeld»** en voer het serienummer van de pomp in (op de achterkant van de pomp)

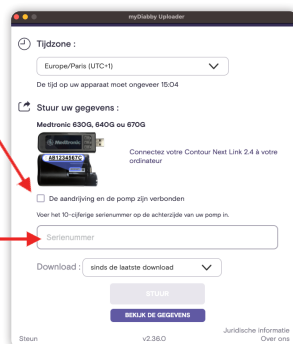

4 Sluit de Contour Next Link 2.4-lezer aan op een USB-poort van de computer.

5 Selecteer de duur van de te uploaden gegevens en klik dan op «Verzenden»

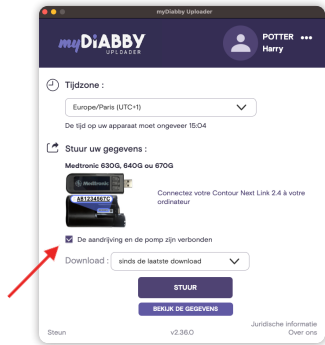


5

6 Uw gegevens worden gedownload naar de computer. Indien de pomp niet met de lezer was verbonden, moet u de verbinding op de pomp bevestigen om het downloaden te starten.

7 Aan het einde van het downloaden klikt u op «Gegevens bekijken» om naar het myDiABBY online platform te gaan en al uw resultaten te bekijken.

t:slim X2™

TANDEM DIABETES CARE

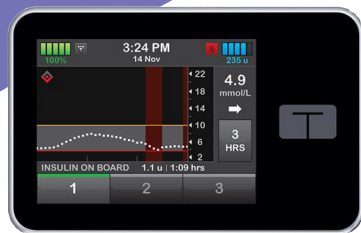

Methode 1 :

Pompgegevens delen met de myDiabby applicatie met een telefoon

myDiabby Uploader is een softwareprogramma dat op de computer moet worden geïnstalleerd om de gegevens van bloedglucosemeters, bloedglucosesensoren en insulinepompen te downloaden op uw account van myDiabby Healthcare.



myDiABBY
UPLOADER

1 - Voordat u begint, moet u :


- Maak uw myDiabby account aan
- Insulinepompen
- De USB-kabel van de Tandem t:slim x2-pomp

2 - U kunt nu de myDiabby Uploader software downloaden :


Zie **pagina 55** voor een **handleiding voor myDiabby Uploader** op Windows of Mac.

Zodra u de myDiabby Uploader software hebt gedownload en geïnstalleerd, volgt u deze stappen:


- 1 **Installeer myDiabby Uploader** op uw computer. Meld u aan met uw gebruikelijke gegevens van myDiabby Healthcare en volg de instructies van de software.

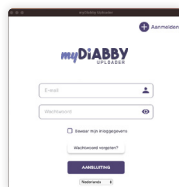

- 2 **Selecteer het apparaat/de apparaten** die u wilt downloaden en bevestig

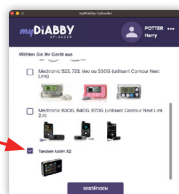

- 3 **Sluit de Tandem t:slim X2-pomp** met een USB-kabel aan op de computer.

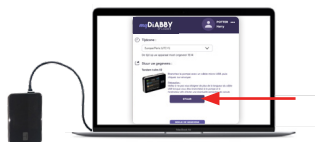


- 4 **Klik op «Verzenden» op myDiabby Uploader.**

- 5 **De gegevens worden naar de computer gedownload.**

NB > Als er een Dexcom-sensor is aangesloten op de tandem t:slim X2-pomp, worden de continue glucosegegevens ook naar myDiabby verzonden

- 6 **Aan het einde van het downloaden klikt u op «Gegevens bekijken» om naar het myDiabby online platform te gaan en al uw resultaten te bekijken.**

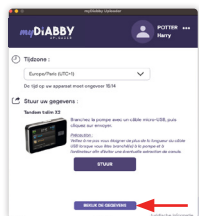

Methode 2 :

Pompgegevens delen met de myDiabby applicatie met een telefoon

Benodigd materiaal

De **Android-smartphone** waarop de applicatie **myDiabby** is gedownload, **aangesloten** patiëntenaccount.



De PDM van de Tandem t:slim x2

Een adapter om een USB-kabel aan te sluiten op de smartphone



De USB-kabel van de Tandem t:slim x2-pomp

Hoe gaat u te werk?

- 1 Sluit eerst **de kabel aan op de telefoon** met de adapter

- 2 Sluit **de kabel aan op de pomp**

- 3 De applicatie **myDiabby** wordt automatisch **gestart** en het delen van gegevens start op de applicatie.


Indien de applicatie de toestemming vraagt voor toegang tot de USB van de telefoon, klik dan op "Toestaan" of "Accepteren".

- 4 Het **symbool van de kabel knippert** en een voortgangsbalk verschijnt tijdens het delen van gegevens. **Wacht** tot de overdracht is voltooid.

Opgelet :

Koppel de kabel niet los van de lezer of telefoon tijdens het delen van gegevens. Als er veel gegevens te delen zijn, kan de overdracht enkele minuten duren.


- 5 De **pompgegevens worden weergegeven op myDiabby!** U kunt nu de telefoon en Tandem t:slim x2 loskoppelen.

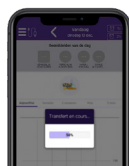

TouchCare Nano

TouchCare 300

MEDTRUM

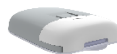

- 1 **Verbind de TouchCare Nano of 300-pomp via Bluetooth met de EasyPatch-toepassing of upload uw PDM-gegevens naar de EasyTouch-toepassing, volgens de insulinepomphandleiding.**

Met de EasyPatch-applicatie kan de pomp worden bediend via de smartphone, waarbij de gegevens automatisch worden geüpload naar de **Medtrum-cloud**. De gegevens die beschikbaar zijn op de Medtrum cloud worden vervolgens automatisch verzonden naar myDiabby Healthcare, de applicatie die zorgt voor een link met het medische team.

- 2 **Log in op uw myDiabby Healthcare account** vanaf een computer OF de myDiabby mobiele applicatie.

- 3 **Klik op het tabblad «Mijn geconnecteerde devices», vervolgens op «Ik verbind mijn bloedsuikerspiegelsensor continu».**



- 4 **Selecteer de Medtrum-knop**




- 5 **Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw EasyPatch / EasyTouch account in.** Lees de gebruiksvoorwaarden, **vink het vakje voor acceptatie aan**, voer uw **naam** in het daarvoor bestemde veld in en klik op «**Autoriseer**» om het delen van gegevens te accepteren.

- 6 Dit bericht verschijnt op het scherm en bevestigt dat het **Medtrum cloud account verbonden is met myDiabby Healthcare**. Klik op «Terug» om terug te keren naar myDiabby Healthcare.



Je insulinepomp gegevens worden nu gedeeld op myDiabby Healthcare!

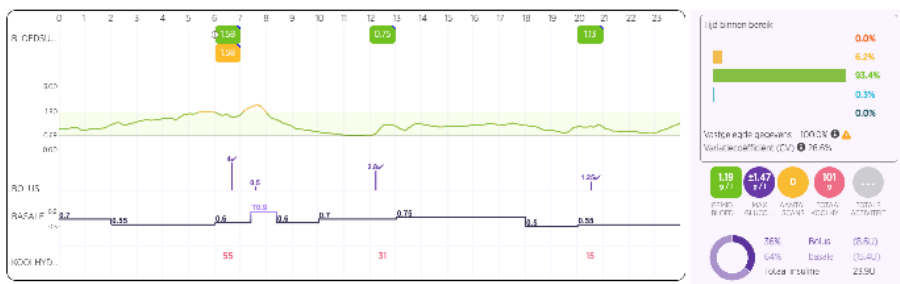

MERK OP

Controleer regelmatig of de gegevens van uw TouchCare insulinepomp zichtbaar zijn op de Medtrum cloud zodat het medisch team de resultaten kan zien op myDiabby Healthcare.

> Het downloaden van gegevens gebeurt automatisch in de EasyPatch toepassing en handmatig in de EasyTouch toepassing.

> Zodra de Medtrum- en myDiabby Healthcare-cloudaccounts zijn verbonden, worden er regelmatig automatisch gegevens verzonden. **De weergegeven gegevens lopen 3 uur achter op de laatst beschikbare gegevens.**



AANGESLOTEN INSULINECAPSULES EN -PENNEN


NovoPen® 6
en NovoPen® Echo Plus



p53

NOVO NORDISK


NOVOPEN 6 ET ECHO PLUS

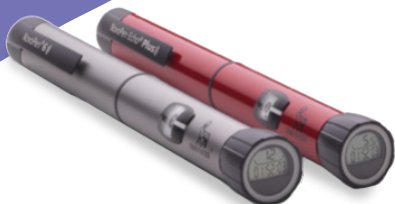

NFC-verbinding

De gegevensoverdracht gebeurt via de NFC-antenne door de insulinepen dicht bij uw smartphone te brengen.

- 1 **Activeer de NFC op uw smartphone** (in de instellingen)
- op sommige smartphones is NFC standaard geactiveerd en kan het niet worden uitgeschakeld

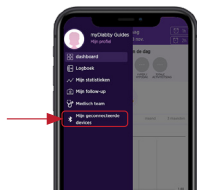

- 2 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»


- 3 Selecteer «Ik sluit een insulinepen aan»



- 4 Selecteer «Novo Nordisk NovoPen® 6 / NovoPen Echo® Plus Insulinepen», en klik vervolgens op «Ik verbind mijn apparaat»

- 5 **Het zoeken is bezig:**


- Bij Android brengt u de insulinepen naar de NFC-chip op uw smartphone:
- Op de iPhone brengt u de insulinepen dicht bij de NFC-chip. Uw iPhone gaat dan trillen zodra de pen is gedetecteerd en er verschijnt een bevestiging op het scherm.

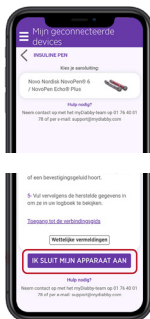

Er verschijnt een pop-up met een voortgangsbalk: de pen wordt gedetecteerd, Verplaats de pen niet overdrachtstijd




6 Selecteer uw pen en bevestig uw keuze.

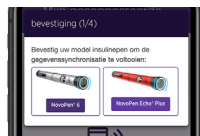

6

7 Selecteer het insulinetype van uw pen: alle compatibele insulines worden in de lijst **weergegeven**

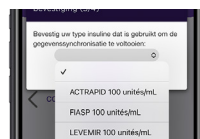


7

8 Uw pen lijkt verbonden, druk op op **“Synchronisatie”** om de gegevens te herstellen op de pen aanbrengen **door stap 5 te herhalen.**

Uw gegevens worden gesynchroniseerd met uw account myDiabby Gezondheidszorg!

Dagelijks gebruik

- 1** Meld u aan op de applicatie myDiabby
- 2** Open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»
- 3** Bij de pen die u hebt aangesloten, drukt u op «Synchroniseren»
- 4** Beweeg uw insulinepen naar de NFC-antenne van uw smartphone totdat u een trilling voelt of een bevestigingsgeluid hoort
- 5** Uw gegevens worden opgenomen!

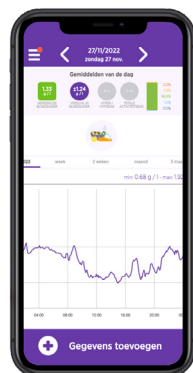

MYDIABBYUPLOADER

PC WINDOWS



p56

MAC



p58

MyDiabby Uploader

myDiABBY
UPLOADER





Download gegevens van uw apparaten via USB naar een computer.

MyDiabby Uploader is een softwareprogramma dat u op uw computer installeert en waarmee u gegevens van bloedglucosemeters, bloedglucosesensoren en insulinepompen kunt uploaden naar uw myDiabby-account.

myDiabby Uploader is compatibel met Windows (vanaf Windows 8.1) en MacOS (vanaf MacOS 10.14).

Uploadbare apparaten met myDiabby Uploader:

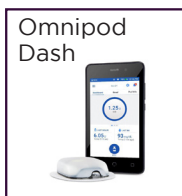
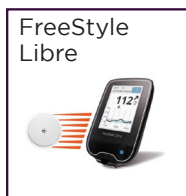


PC Windows




1 - Installatie

- 1 Download myDiabby Uploader voor Windows op de site www.mydiabby.com/uploader
- 2 Open het .exe-bestand dat naar de computer is gedownload.
- 3 Installeer de software op uw computer door de installatiestappen te volgen.
- 4 De myDiabby Uploader software is nu geïnstalleerd op uw computer!

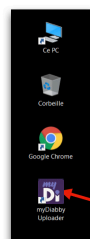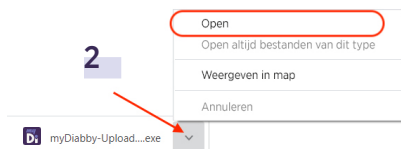

2 - Gebruik van myDiabby Uploader

- 1 Open myDiabby Uploader en meld u aan op uw myDiabby-account met uw gebruikelijke e-mail en wachtwoord (hetzelfde als op de myDiabby-applicatie).
(U kunt het vakje «Bewaar mijn inloggegevens» aanvinken om aangemeld te blijven voor toekomstige openingen van myDiabby Uploader)
- 2 Selecteer de apparaten die u wilt downloaden en klik op Bevestigen.
- 3 Sluit uw toestel via een USB-kabel aan op de computer en klik vervolgens op de knop «Verzenden».
- 4 De gegevens van uw apparaat worden nu gedownload in de applicatie myDiabby!
- 5 Om toegang te krijgen tot uw myDiabby account en uw resultaten te bekijken, klikt u op de knop «Gegevens bekijken» of opent u de myDiabby mobiele applicatie op uw telefoon.

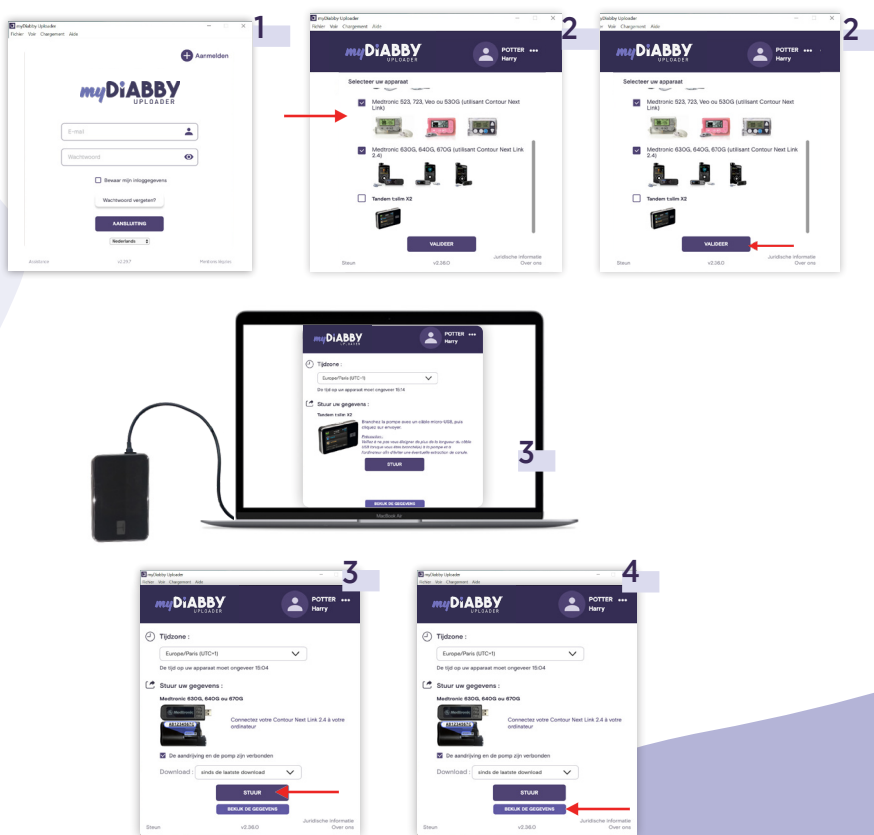

MyDiabby Uploader




myDiABBY
UPLOADER



MAC 


1 - Installatie

- 1 Download myDiabby Uploader voor Mac op de site www.mydiabby.com/uploader
- 2 Open de map Downloads en dubbelklik op het .dmg-bestand
Het bestand wordt geopend.
- 3 Laat myDiabby Uploader openen op uw Mac door te klikken op «**Openen**»
- 4 Dit venster wordt geopend: Sleep de myDiabby Uploader-toepassing naar de map **Toepassingen**
- 5 De software is nu beschikbaar in Launchpad. **Klik op het Launchpad.**
- 6 Dan op de applicatie myDiabby Uploader.

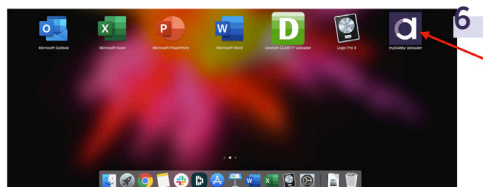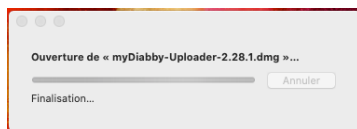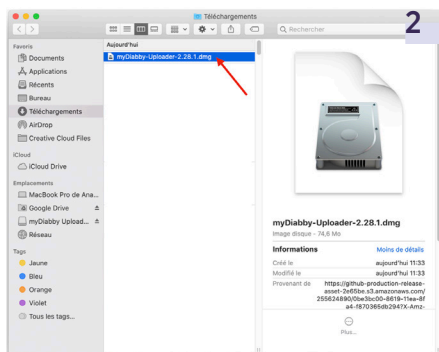

2 - Gebruik van myDiabby Uploader

- 1 Open myDiabby Uploader en meld u aan op uw myDiabby-account met uw gebruikelijke e-mail en wachtwoord (hetzelfde als op de myDiabby-applicatie).
(U kunt het vakje «Bewaar mijn inloggegevens» aanvinken om aangemeld te blijven voor toekomstige openingen van myDiabby Uploader)
- 2 Selecteer de apparaten die u wilt downloaden en klik op Bevestigen.
- 3 Sluit uw toestel via een USB-kabel aan op de computer en klik vervolgens op de knop «Verzenden».
- 4 De gegevens van uw apparaat worden nu gedownload in de applicatie myDiabby!
- 5 Om toegang te krijgen tot uw myDiabby account en uw resultaten te bekijken, klikt u op de knop «Gegevens bekijken» of opent u de myDiabby mobiele applicatie op uw telefoon.

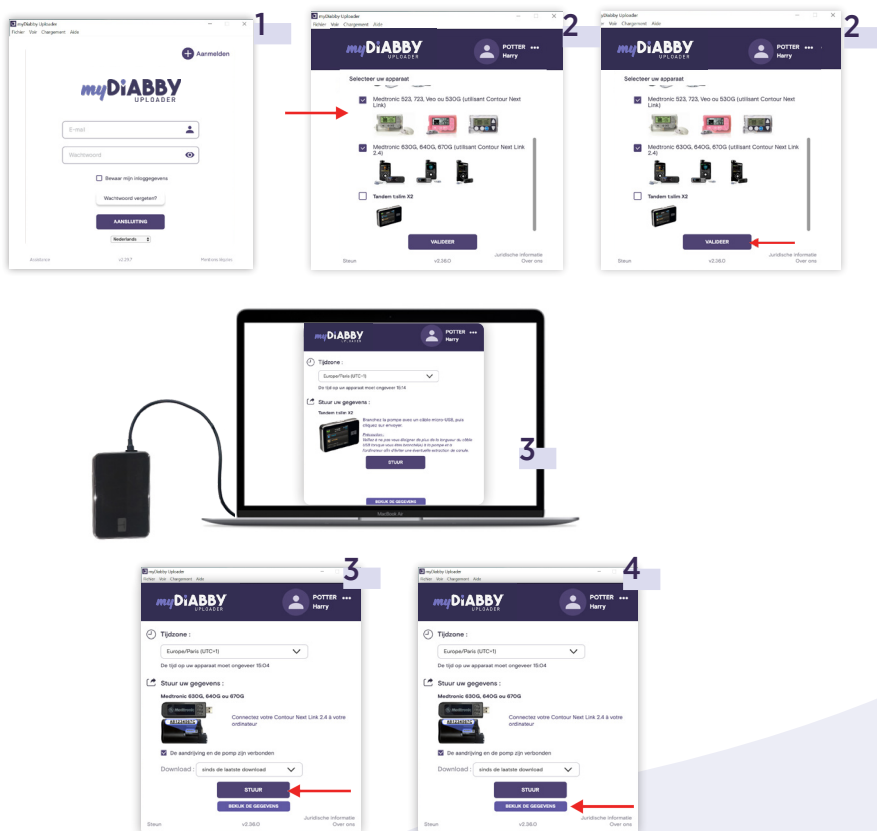

EEN TEAM TOT UW DIENST

Hulp nodig?



 01 76 40 01 78

 02 320 11 96

van maandag tot vrijdag : 09h - 17h



support@mydiabby.com



<https://help.mydiabby.com>

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE



CE
0459

