

## VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare\*




Contour.  
next<sup>®</sup>

### Kopplung des Blutzucker-Messgeräts mit der App myDiabby

- ⌚ Zuvor kontrollieren, dass Datum und Uhrzeit auf dem Blutzucker-Messgerät dem Telefon entsprechen. Anderenfalls unter Beachtung der Gebrauchsanleitung des Messgeräts einstellen.

- 1 Aktivieren Sie **Bluetooth auf Ihrem Smartphone**

- 2 Melden Sie sich bei **myDiabby** an und öffnen Sie den Tab „**Meine verbundenen Geräte**“

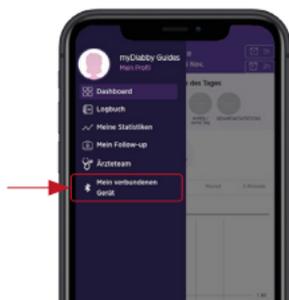

- 3 Schalten Sie das Messgerät **Contour Next** durch einen verlängerten Druck auf die Taste **OK** ein.

- 4 Aktivieren Sie **Bluetooth** auf dem Messgerät, ▲ indem Sie die Taste länger drücken.

Das Logo Bluetooth Ⓜ erscheint auf dem Display des Messgeräts.



- 5 In der **App myDiabby**, Klick auf den Button „**Ich verbinde mein kapillares Blutzucker-Messgerät**“, dann „**ASCENSIA Contour NEXT**“.



- 6 Klick auf den Button „**Ich verbinde mein Messgerät**“



- 7 Geben Sie in der App den **sechststelligen Zahlencode** ein, der auf dem Display des Messgeräts zu sehen ist, dann Bestätigen.



- 8 Das Messgerät wird eingeblendet.  
Klick auf „Hinzufügen“

Ihr Blutzucker-Messgerät ist jetzt mit Ihrer App myDiabby gekoppelt!

Wenn Sie bereits mit dem Messgerät erfasste Daten auf myDiabby übertragen wollen, Klick auf den Button „Mein Messgerät synchronisieren“



## Täglicher Gebrauch

- 1 Die **Blutzucker-Messung** wie gewohnt mit dem Blutzucker-Messgerät durchführen.

- 2 Nachdem das Ergebnis auf dem Display des Messgeräts eingeblendet wird, **den Teststreifen vom Messgerät nehmen, danach die App myDiabby in der Nähe zum Messgerät auf dem Telefon öffnen** (darauf achten, dass Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist).




- 3 Das Ergebnis der Blutzuckermessung wird automatisch an die App myDiabby übertragen.

Wenn die Mahlzeit oder die dem Blutzuckerwert entsprechende Tageszeit geändert werden muss, anklicken und die entsprechenden Angaben machen.



### Im Fall von Schwangerschaftsdiabetes:

Nach Einblenden des Blutzuckerwerts in der App myDiabby, die Tageszeit **ANKREUZEN** oder **ÜBERPRÜFEN**, damit das Ergebnis an der richtigen Stelle im Logbuch erscheint. Sie können **Anmerkungen** oder Insulindosen **hinzufügen**.

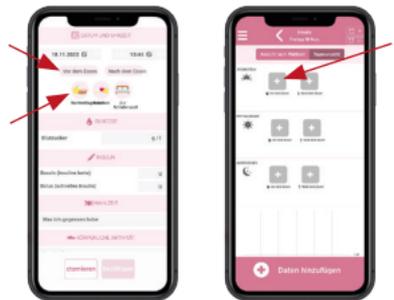

GCCNV02D20241601DE

Bei Fragen zur App myDiabby:  
[support@mydiabby.com](mailto:support@mydiabby.com) oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS  
66 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459