


VERBINDINGSGIDS

Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare*

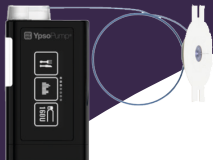

Koppeling van de pomp met de applicatie myDiabby

- Download de 2 applicaties **myDiabby** en **mylife** op de telefoon.


Meld u aan op elk van de 2 applicaties.

Met de applicatie mylife kunt u gegevens van de Ypsopump-insulinepomp verzamelen. Mylife zal de gegevens vervolgens automatisch versturen naar myDiabby Healthcare, die de toepassing is waarmee u een verbinding kunt maken met het medisch apparaat.






- Verbind de Ypsopump-pomp via Bluetooth met de mylife-applicatie door de insulinepompgids te volgen.


- Meld u aan op de applicatie **myDiabby** en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

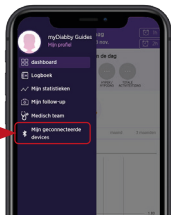


- Selecteer «Ik sluit mijn insulinepomp aan», dan «Ypsopump». Klik op de knop «Mijn gezondheidsapplicatie verbinden».

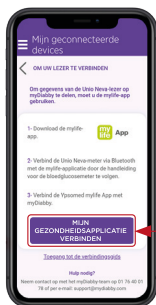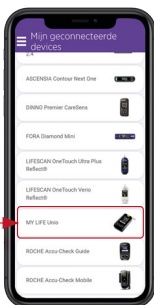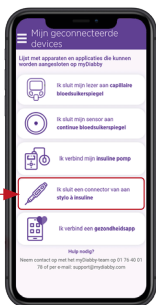

- 5 Geef de **aanmeldgegevens van de mylife-account** in, **bevestig** vervolgens.

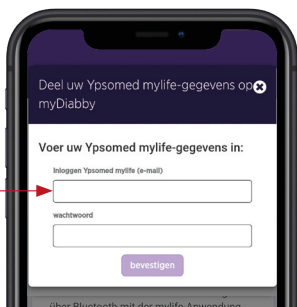


- 6 De gegevens van Mylife Ypsopump worden nu gedeeld in de applicatie myDiabby!

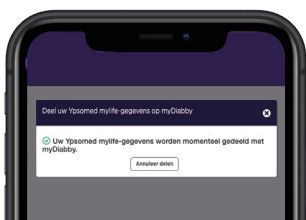

MERK OP

- Alle gegevens die manueel of via Bluetooth zijn ingegeven in de applicatie mylife worden gedeeld met de applicatie myDiabby (pompgegevens, bloedsuikerspiegel, maaltijden, enz.)
- De gegevens worden regelmatig van de applicatie mylife naar de applicatie myDiabby gestuurd. Het is soms mogelijk dat er een kleine synchronisatievertraging is in de applicatie myDiabby, hetgeen volledig normaal is.

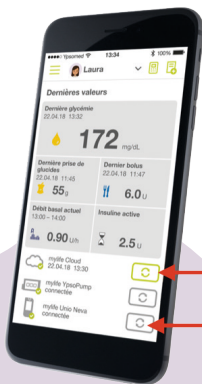

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:
support@mydiabby.com of per telefoon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.



Document van toepassing vanaf versie 2.19 van myDiabby Healthcare

0459