

VERBINDUNGSLEITFADEN


Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*



Dexcom

Wenn Sie eine mobile Dexcom-Anwendung verwenden, fahren Sie direkt mit Schritt 3 fort.



- 1 Legen Sie ein Dexcom Clarity-Benutzerkonto auf folgender Website an:
<https://uam2.dexcom.com/index.html#/register>

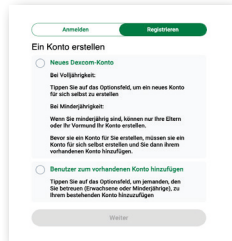


- 2 Laden Sie den Dexcom Clarity Uploader auf der folgenden Website herunter:
<https://clarity.dexcom.eu/?locale=fr-FR#/home-user-upload>
Spielen Sie danach unter Befolgen der Anweisungen auf dem Display die Daten des Sensors auf Dexcom Clarity auf.





- 3 Melden Sie sich auf einem Rechner ODER über die mobile App beim myDiabby Healthcare-Konto an:
- 4 Klick auf den Tab „Meine verbundenen Geräte“, dann auf „Ich verbinde meinen kontinuierlich messenden Blutzuckersensor“.

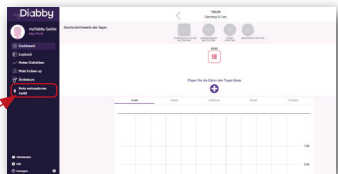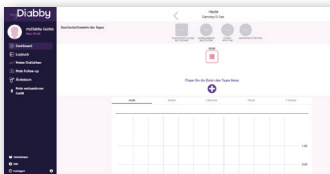

- 5** Wählen Sie den Button **Dexcom** und klicken dann auf den Button „**MEINE GESUNDHEITS-APP VERBINDEN**“.

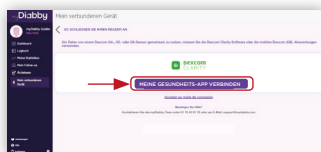


- 6** Geben Sie **Benutzernamen** und **Kennwort** für das **Dexcom-Konto** ein. Lesen Sie die Benutzungshinweise und geben Sie **danach Ihren Namen** ein und klicken auf „**Zustimmen**“.

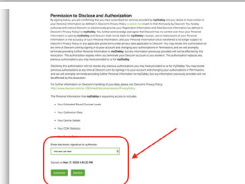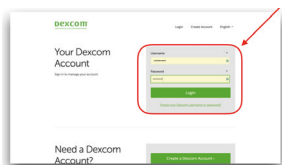

- 7** Diese Meldung wird auf dem Display eingeblendet und bestätigt die **Verbindung des Dexcom-Kontos mit myDiabby Healthcare**. Kehren Sie durch Klick auf „**Zurück**“ zu myDiabby Healthcare zurück.

Die kontinuierlich gemessenen Blutzuckerwerte werden jetzt auf myDiabby Healthcare geteilt!

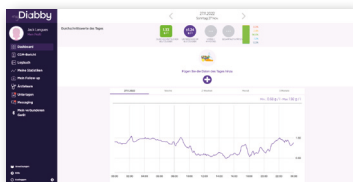

HINWEIS

Laden Sie die Daten des Dexcom-Sensors regelmäßig auf Dexcom Clarity herunter, damit das Ärzteteam sie auf myDiabby Healthcare sehen kann.

> Sobald die **Dexcom**- und **myDiabby Healthcare**-Konten verbunden sind, werden die Daten regelmäßig automatisch gesendet. Die angezeigten Daten liegen 3 Stunden hinter den neuesten verfügbaren Daten.

> Wenn Sie ein **Dexcom G6** verwenden, das mit einer **Insulinpumpe Tandem t:slim X2** verbunden ist, reicht das Herunterladen der Pumpe auf myDiabby aus, damit die Daten der **Tandem Pumpe und des Sensors G6 auf myDiabby Healthcare** erscheinen.

Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE



0459