

VERBINDINGSGIDS

Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare*




Lifescan
OneTouch Verio Flex®

Koppeling van de lezer met de applicatie myDiabby

Wanneer u uw bloedglucosemeter OneTouch Verio Flex koppelt met de applicatie myDiabby, worden de datum en het uur automatisch ingesteld op de lezer op basis van de datum en het uur van de telefoon

- 1 Activeer **Bluetooth** op de smartphone
- 2 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «**Mijn geconnecteerde devices**»
- 3 Selecteer «**Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan**», en selecteer vervolgens uw lezer in de lijst

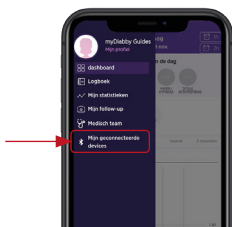

- 4 Klik op de knop «**Ik verbind mijn lezer**»



- 5 Schakel de lezer in OneTouch Verio Flex

- 6 Activeer Bluetooth op de lezer door tegelijkertijd op de knoppen ▲ en OK te drukken. Het Bluetooth-logo Ǝ verschijnt op het scherm van de lezer.


(Als het Bluetooth-symbool Ǝ reeds brandt op de bloedglucosemeter, kunt u rechtstreeks naar stap 6 gaan.)



7 Op de applicatie myDiabby klikt u op de knop “Mijn lezer zoeken”

8 De lezer verschijnt op het scherm. Klik op “Toevoegen”

9 Geef in de applicatie de 6-cijferige code in op het scherm van de bloedglucosemeter, bevestig vervolgens.

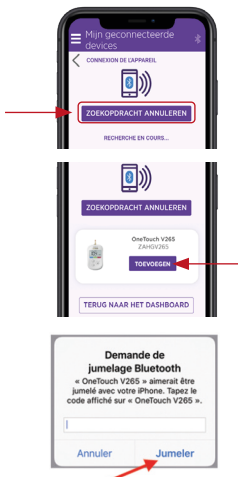

Dagelijks gebruik

1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.


2 Zodra het resultaat van de bloedsuikerspiegel op het scherm van de lezer verschijnt, **verwijdert u het strookje uit de lezer**, vervolgens opent u de applicatie myDiabby op de telefoon in de buurt van de lezer. (Controleer of Bluetooth actief is op de smartphone)

3 Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt automatisch verstuurd naar de applicatie myDiabby!
Als u op de lezer de marker voor/na maaltijd hebt aangeduid, wordt dit doorgestuurd naar myDiabby.



Als u zwangerschapsdiabetes hebt:

zodra de bloedsuikerspiegel op de applicatie myDiabby verschijnt, **VINKT** u het moment van de dag af of **VERIFIEERT** u het moment van de dag zodat het resultaat op de juiste plaats in de notebook wordt geplaatst. U kunt **opmerkingen** of insulinedoses **toevoegen**.

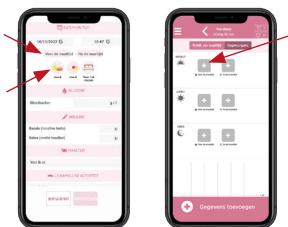

GCOTFV02D20241601NL

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:
support@mydiabby.com of per telefoon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Élysées
75008 Paris
FRANCE

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

Document van toepassing vanaf versie 2.19 van myDiabby Healthcare



0459