

## VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare\*



**Medtronic 640G**

Teilen über USB-Kabel auf einem PC oder Mac


### Phase 1 : myDiabbyUploader

- 1 myDiabby Uploader für Windows oder Mac auf folgender Website **herunterladen**:  
**[www.mydiabby.com/uploader](http://www.mydiabby.com/uploader)**. myDiabby Uploader auf Ihrem Rechner **installieren**




**myDiABBY**  
UPLOADER

- 2 Melden Sie sich mit Ihren üblichen **Kenndaten** für **myDiabby Healthcare** an und befolgen Sie die Anweisungen der Software.

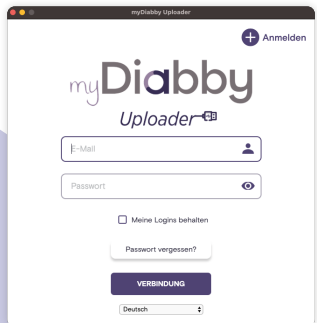


- 3 Das oder die **Geräte wählen**, die heruntergeladen werden sollen **und Bestätigen**

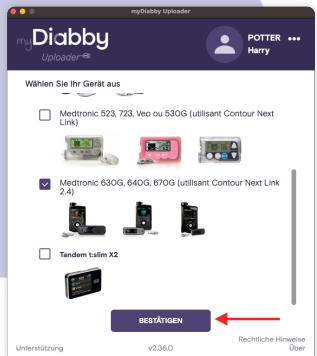

## Phase 2: Anschluss


- 4** Wenn die Insulinpumpe und das Messgerät Contour Next Link 2.4 verbunden sind, das Feld **„Messgerät und Pumpe sind verbunden“** ankreuzen.

Wenn die Insulinpumpe und das Messgerät Contour Next Link 2.4 nicht verbunden sind, das Feld **„Messgerät und Pumpe sind verbunden“** abwählen, dann die Seriennummer der Pumpe (siehe Rückseite der Pumpe) eingeben.

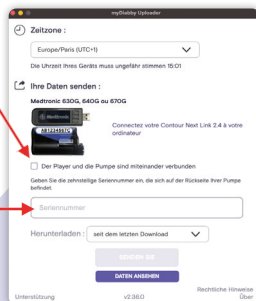

- 5** Das Messgerät Contour Next Link 2.4 an einen USB-Port **des Rechners anschließen**.

- 6** Die Dauer der herunterzuladenden Daten **wählen** und auf **„Senden“** klicken.

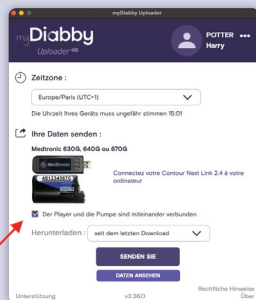

- 7** **Ihre Daten werden auf den Rechner gezogen.** Wenn die Pumpe nicht an das Messgerät angeschlossen war, müssen Sie den Anschluss der Pumpe bestätigen, um das Herunterladen zu starten.

- 8** Am Ende des Herunterladens auf **„Daten anzeigen“** klicken, um auf die myDiabby Online-Plattform zu gehen und alle Ihre Ergebnisse anzuzeigen.

Bei Fragen zur App myDiabby:  
[support@mydiabby.com](mailto:support@mydiabby.com) oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS  
66 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459

Dokument anwendbar ab myDiabby Healthcare Version 2.19

GCM640V02D2024160IDE