

VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*




FORA[®] Diamond
MINI

Kopplung des Blutzucker-Messgeräts mit der App myDiabby

Wenn Sie Ihr Blutzucker-Messgerät [Messgerät] mit der App myDiabby koppeln, stellen sich Datum und Uhrzeit am Messgerät automatisch ausgehend von Datum und Uhrzeit des Telefons ein.

- 1 Aktivieren Sie **Bluetooth** auf Ihrem Smartphone
- 2 Melden Sie sich bei **myDiabby** an und öffnen Sie den Tab **„Meine verbundenen Geräte“**
- 3 Wählen Sie **„Ich verbinde mein kapillares Blutzucker-Messgerät“** und wählen Sie danach **Ihr Messgerät** aus der Liste

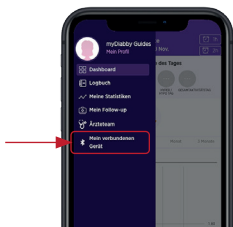

- 4 Klick auf den Button **„Ich verbinde mein Messgerät“**



- 5 **Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Player**, indem Sie ihn ein- und ausschalten. Gehen Sie dazu wie folgt vor :
 - Führen Sie einen Teststreifen in das Messgerät ein.
 - Warten Sie 1 Sekunde, bis sich das Messgerät einschaltet und bereit ist, eine Blutzuckermessung vorzunehmen.
 - Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Messgerät heraus.

Das Messgerät schaltet sich aus und das blaue Licht blinkt: **Die Bluetooth-Funktion des Messgeräts ist eingeschaltet.**



6 In der App myDiabby, Klick auf den Button „Mein Messgerät suchen“



7 Das Messgerät wird eingeblendet. Klick auf „Hinzufügen“

Ihr Blutzucker-Messgerät ist jetzt mit Ihrer App myDiabby gekoppelt!
Wenn Sie bereits mit dem Messgerät erfasste Daten auf myDiabby übertragen wollen, Klick auf den Button „Mein Messgerät synchronisieren“




Täglicher Gebrauch

1 Die **Blutzucker-Messung** wie gewohnt mit dem Blutzucker-Messgerät durchführen.



2 Nachdem das Ergebnis auf dem Display des Messgeräts eingeblendet wird, **den Teststreifen vom Messgerät nehmen**, danach die App myDiabby in der Nähe zum Messgerät auf dem Telefon öffnen (darauf achten, dass Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist).

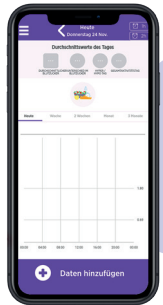


3 Das Ergebnis der Blutzuckermessung wird automatisch an die App myDiabby übertragen.



Im Fall von Schwangerschaftsdiabetes:

Nach Einblenden des Blutzuckerwerts in der App myDiabby, die Tageszeit **ANKREUZEN** oder **ÜBERPRÜFEN**, damit das Ergebnis an der richtigen Stelle im Logbuch erscheint. Sie können **Anmerkungen** oder Insulindosen **hinzufügen**.

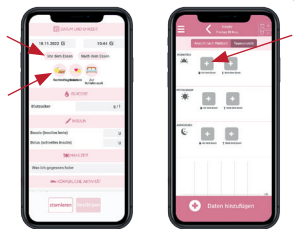

GCFDMV03D20241406DE

Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459

Dokument anwendbar ab myDiabby Healthcare Version 2.25