

VERBINDINGSGIDS



Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare*



NFC-verbinding voor Glucofix® Tech en Glucofix® Tech 2K-lezers

De gegevensoverdracht gebeurt via de NFC-antenne door de lezer dicht bij uw smartphone te brengen.

- 1 Zorg ervoor dat de bloedglucosemeter is ingesteld op de juiste datum en het juiste uur om de connectiviteit met de applicatie myDiabby te gebruiken.
- 2 **Activeer de NFC op uw smartphone** (in de instellingen) *op sommige smartphones is NFC standaard geactiveerd en kan het niet worden uitgeschakeld*
- 3 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»
- 4 Selecteer «Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan», en selecteer vervolgens uw lezer in de lijst

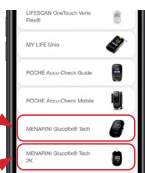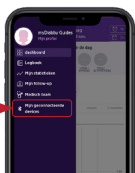

- 5 Klik op de knop « Ik verbind mijn lezer »

- 6 Activeer NFC op de lezer. Om dit te doen:

- 1 **Open het parametermenu van de speler:** druk tegelijkertijd 4 seconden op de **toetsen M (aan/uit)** en **▲**.
- 2 **Druk op de ▼ toets**, een N knippert.
- 3 Druk op de **M-toets**, «Off» verschijnt.
- 4 Druk op **toets ▼**, «On» verschijnt.
- 5 Druk op de **M-toets**, «SET» verschijnt, **de NFC is geactiveerd op uw lezer.**
- 6 **Zet de meter uit:** druk 3 seconden op de M-toets



7 Het zoeken is bezig:

- Bij Android **brengt u de lezer naar de NFC-chip op uw smartphone.**
- Op de iPhone **brengt u de lezer dicht bij de NFC-chip.**
Uw iPhone gaat dan trillen zodra de lezer is gedetecteerd en er verschijnt een bevestiging op het scherm.

Dagelijks gebruik

1 **De bloedsuikerspiegel meten** met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.

2 **Meld u aan op de applicatie myDiabby** en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

3 Bij de lezer die u hebt aangesloten, drukt u op «**Synchroniseren**»


4 Het zoeken is bezig:

- Bij Android **brengt u de lezer naar de NFC-chip op uw smartphone.**
- Op de iPhone **brengt u de lezer dicht bij de NFC-chip.**
Uw iPhone gaat dan trillen zodra de lezer is gedetecteerd en er verschijnt een bevestiging op het scherm.



Als u zwangerschapsdiabetes hebt:

zodra de bloedsuikerspiegel op de applicatie myDiabby verschijnt, **VINKT** u het moment van de dag af of **VERIFIEERT** u het moment van de dag zodat het resultaat op de juiste plaats in de notebook wordt geplaatst. U kunt **opmerkingen** of insulinedoses toevoegen.

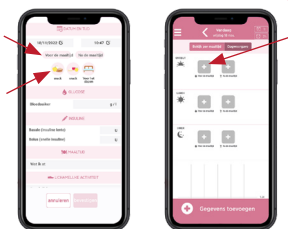

CGGFTV02D20241601NL

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:
support@mydiabby.com of per telefoon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Élysées
75008 Paris
FRANCE

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.



Document van toepassing vanaf versie 2.19 van myDiabby Healthcare

0459