

VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*




Medtrum

- 1 **Verbinden Sie die Pumpe TouchCare Nano oder 300 per Bluetooth mit der EasyPatch-App oder laden Sie Ihre PDM-Daten auf die EasyTouch-App hoch, wobei Sie der Anleitung für die Insulinpumpe folgen.**

Mit der EasyPatch-App kann die Pumpe mit dem Smartphone gesteuert werden, die Daten werden automatisch auf die **Medtrum-Cloud** hochgeladen. Die in der Medtrum-Cloud verfügbaren Daten werden dann automatisch an myDiabby Healthcare gesendet, das ist die App, mit der man mit dem medizinischen Team in Verbindung steht.

- 2 **Melden Sie sich über einen Computer ODER die mobile myDiabby-App bei Ihrem myDiabby Healthcare-Konto an.**

- 3 **Klicken Sie auf den Reiter «Meine verbundenen Objekte» und dann auf «Ich verbinde eine Gesundheitsanwendung».**

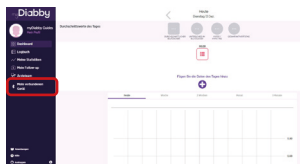

- 4 **Wählen Sie die Schaltfläche Medtrum**




- 5 **Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort für das EasyPatch / EasyTouch-Konto ein. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Akzeptieren, geben Sie Ihren Namen in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie dann auf «Zulassen», um der Datenfreigabe zuzustimmen.**

- 6 Diese Meldung erscheint auf dem Bildschirm auf und bestätigt, dass das **Medtrum-Cloud-Konto mit myDiabby Healthcare verbunden ist**. Klicken Sie auf «Rückkehr», um zu myDiabby Healthcare zurückzukehren.



Ihre Insulinpumpendaten werden jetzt auf myDiabby Healthcare geteilt!

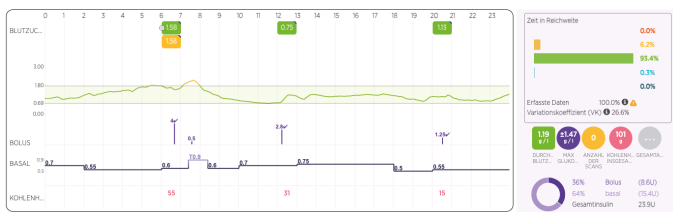

ZU BEACHTEN

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Daten Ihrer TouchCare-Insulinpumpe in der Medtrum-Cloud sichtbar sind, damit das Ärzteteam die Ergebnisse auf myDiabby Healthcare sehen kann.

> Das Herunterladen der Daten erfolgt bei der EasyPatch-App automatisch und bei der EasyTouch-App manuell.

> Sobald das Medtrum-Cloud-Konto und myDiabby Healthcare miteinander verbunden sind, **sendet die Medtrum-Cloud automatisch alle 8 Stunden Daten, die älter als 3 Stunden sind, an myDiabby Healthcare.**

Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
 66 avenue des Champs Elysées
 75008 Paris
 FRANCE

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459