

GUIDE DE CONNEXION

Ce guide de connexion met à disposition les éléments de connexion spécifiques à votre appareil. Se référer à la notice pour l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de myDiabby Healthcare*




Medtronic 640G

Partage par câble USB sur un ordinateur ou Mac


Phase 1 : myDiabbyUploader

- 1 Sur un ordinateur, **téléchargez et installez** le logiciel **“myDiabby Uploader”** depuis la page www.mydiabby.com/uploader

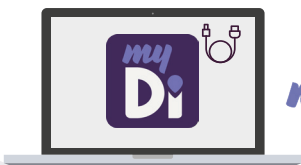


myDiABBY
UPLOADER

- 2 Une fois le logiciel téléchargé, ouvrez-le et **connectez-vous** avec vos identifiants myDiabby

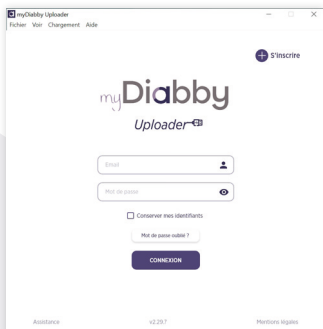


- 3 Sélectionnez le(s) **appareil(s)** que vous souhaitez télécharger puis **Validez**

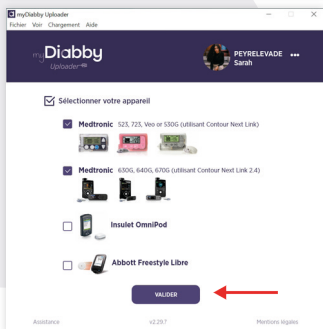

Phase 2 : le branchement


- 4 Si la pompe à insuline et le lecteur Contour Next Link 2.4 sont connectés, cochez la case «**Le lecteur et la pompe sont liés.**»

Si la pompe à insuline et le lecteur Contour Next Link 2.4 ne sont pas connectés, **décochez la case «Le lecteur et la pompe sont liés»**, puis entrez le numéro de série de la pompe (au dos de la pompe)

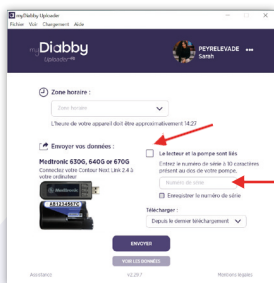

- 5 **Branchez le lecteur** Contour Next Link 2.4 à un port USB de l'ordinateur.

- 6 **Sélectionnez la durée des données à télécharger**, puis cliquez sur «**Envoyer**»

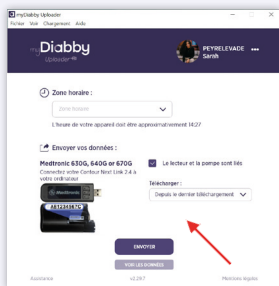

- 7 **Vos données se téléchargent sur l'ordinateur.** Si la pompe n'était pas connectée au lecteur, vous devrez confirmer la connexion sur la pompe pour pouvoir lancer le téléchargement.

- 8 À la fin du téléchargement, cliquez sur «**Voir les données**» pour aller sur la plateforme en ligne myDiabby et voir l'ensemble de vos résultats.

Pour une question sur l'application myDiabby :
support@mydiabby.com ou par téléphone

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*La notice est disponible en téléchargement et en consultation sur la plateforme myDiabby Healthcare.



0459

Document applicable à partir de la version 2.19 de myDiabby Healthcare