

VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*



FreeStyle Libre 

Wenn Sie die FreeStyle-Anwendung LibreLink oder LibreView verwenden, fahren Sie direkt mit Schritt 3 fort.


1 Erstellen Sie ein LibreView-Konto von dieser Website :
www.libreview.com/auth/register

2

Laden Sie die Daten von Ihrem FreeStyle Libre Player mithilfe eines Computers und des mitgelieferten gelben USB-Kabels auf Ihr LibreView-Konto hoch.
Benötigen Sie Hilfe beim Herunterladen von Daten auf LibreView?
Besuchen Sie uns auf : pat.libreview.io/support

3 Melden Sie sich über einen Computer ODER die mobile myDiabby-App bei Ihrem myDiabby Healthcare-Konto an.

4 Klick auf den Tab **„Meine verbundenen Geräte“**, dann auf **„Ich verbinde meinen kontinuierlich messenden Blutzuckersensor“**.

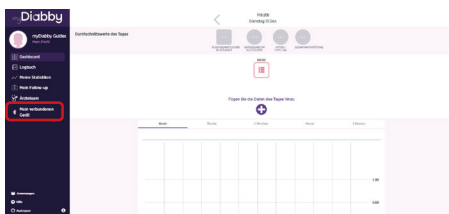


5 Wählen Sie die Schaltfläche **FreeStyle Libre**


FreeStyle Libre 

6 Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort für das FreeStyle-Konto LibreLink / LibreView ein. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie dann auf «Zulassen», um der Datenweitergabe zuzustimmen.

7 Diese Meldung erscheint auf dem Bildschirm auf und bestätigt, dass das LibreView-Konto mit myDiabby Healthcare verbunden ist. Klicken Sie auf «Zurück», um zu myDiabby Healthcare zurückzukehren.

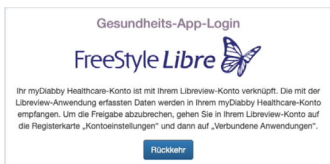

Ihre kontinuierlichen Glukosedata werden jetzt auf myDiabby Healthcare geteilt!

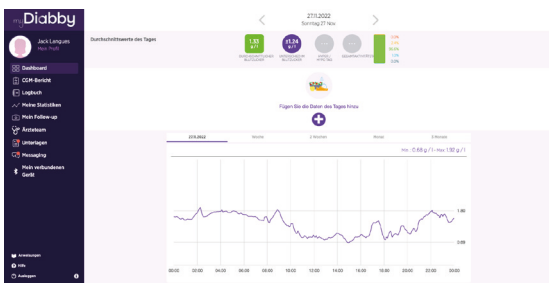

HINWEIS

Laden Sie die Daten des FreeStyle Libre-Sensors regelmäßig auf LibreView hoch, damit das medizinische Team die Ergebnisse auf myDiabby Healthcare sehen kann.

> Sobald LibreView und myDiabby miteinander verbunden sind, sendet LibreView die Glukosedata **automatisch kontinuierlich an myDiabby Healthcare**, sobald diese verfügbar sind. Dies kann zu einer Verzögerung von einigen Minuten zwischen dem Laden der Daten auf LibreView und der Anzeige auf myDiabby Healthcare führen.

> Wenn Sie die Daten Ihres FreeStyle Libre Messgeräts auf myDiabby Healthcare mit einer anderen Methode wiederherstellen möchten, wenden Sie sich bitte an unser Hilfecenter: help.diabby.com

Dokument zur guten Praxis für Patienten, die diese Medizinprodukte verwenden. Bitte beachten Sie die Benutzerhandbücher für FreeStyle Libre 2, FreeStyle LibreLink und LibreView: <https://www.diabetscare.abbott/support/manuals/fr.html>. Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und die zugehörigen Marken sind Marken von Abbott und werden mit Genehmigung verwendet.

Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459

Dokument anwendbar ab myDiabby Healthcare Version 2.19

GCLBVV/01D20241601DE