



VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*




NFC-Verbindung der Pens Novo Nordisk NovoPen 6 und Echo Plus

Die Datenübertragung erfolgt über die NFC-Antenne durch Annähern des Pens an Ihr Smartphone.

1 Aktivieren Sie die NFC auf Ihrem Smartphone (in den Parametern) - auf einigen Smartphones ist NFC standardmäßig aktiviert und nicht deaktivierbar.

2 Melden Sie sich bei **myDiabby** an und öffnen Sie den Tab „**Meine verbundenen Geräte**“

3 Wählen Sie „**Ich verbinde eine Insulin-Pen-Befestigung**“

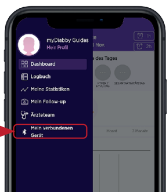

4 Wählen Sie „**Insulin-Pen Novo Nordisk NovoPen® 6 / NovoPen Echo® Plus**“, dann Klick auf „**Ich verbinde mein Gerät**“



5 Die Suche läuft:

- Unter Android den Insulin-Pen in der Nähe des NFC-Chips an Ihr Smartphone halten:
- Auf einem iPhone den Insulin-Pen in die Nähe des NFC-Chips halten. Ihr iPhone vibriert anschließend, sobald der Pen erkannt wird, eine Bestätigung erscheint auf dem Display.



Es erscheint ein Popup mit ein Fortschrittsbalken: der Stift wird erkannt, Bewegen Sie den Stift nicht Transferzeit



6 Wählen Sie Ihren **Stift** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.



7 Wählen Sie den **Insulintyp** Ihres **Pens** aus: **Alle kompatiblen Insuline** werden in der Liste angezeigt




8 Ihr Stift scheint verbunden zu sein. Drücken Sie auf **„Synchronisieren“**, um die Daten wiederherzustellen Tragen Sie es auf den Stift auf, indem Sie Schritt 5 wiederholen.

Ihre Daten werden synchronisiert mit Ihrem myDiabby Healthcare-Konto!



Im Fall von **Schwangerschaftsdiabetes:**

Nach Einblenden des Blutzuckerwerts in der App myDiabby, die Tageszeit **ANKREUZEN** oder **ÜBERPRÜFEN**, damit das Ergebnis an der richtigen Stelle im Logbuch erscheint.

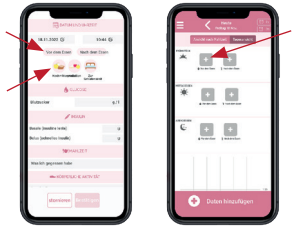

Täglicher Gebrauch

- 1** Melden Sie sich bei myDiabby
- 2** öffnen Sie den Tab **„Meine verbundenen Geräte“**
- 3** Auf dem verbundenen Pen auf **„Synchronisieren“** drücken.
- 4** Nähern Sie den **Insulin-Pen** an die **NFC-Antenne** Ihres **Smartphones** an, bis Sie eine Vibration spüren oder einen Bestätigungston hören.
- 5** Ihre Daten werden **gespeichert!**

Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459