


## VERBINDINGSGIDS


Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare\*





- 1 **Maak een Dexcom Clarity-account** aan via deze site:  
<https://uam2.dexcom.com/index.html#/register>

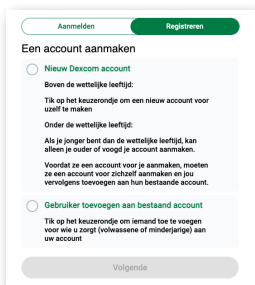

- 2 **Download de Dexcom Clarity Uploader** van deze pagina:  
<https://clarity.dexcom.eu/?locale=fr-FR#/home-user-upload>  
Download vervolgens de gegevens van de sensor naar Dexcom Clarity door de instructies op het scherm te volgen.

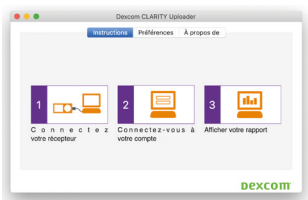

- 3 **Meld u aan op uw myDiabby-account** vanaf een computer **OF** de mobiele applicatie.
- 4 **Klik op het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»**, vervolgens op «Ik verbind mijn bloedsuikerspiegelsensor continu».

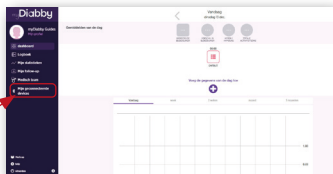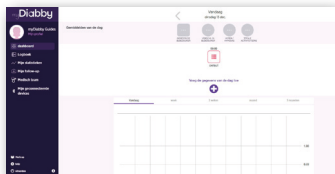

**5** Kies de **Dexcom-** knop, klik vervolgens op de knop «**MIJN GEZONDHEIDSAPPLICATIE VERBINDEN**»





**7** Dit bericht verschijnt op het scherm en bevestigt dat uw **Dexcom-account verbonden is met myDiabby.**

Klik op «**Terug**» om terug te keren naar myDiabby Healthcare.

**De continue bloedsuikerspiegelgegevens worden nu gedeeld in de applicatie myDiabby Healthcare !**



**6** Geef de gegevens en het wachtwoord van uw **Dexcom-account** in. Lees de gebruiksvoorwaarden, voer vervolgens uw naam in en klik op «**Toestaan**» om te accepteren.

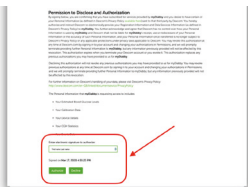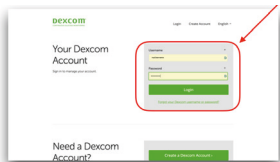

**MERK OP**

Download de **Dexcom-sensorgegevens** regelmatig naar **Dexcom Clarity** zodat het medisch team de resultaten kan zien op myDiabby.

> Zodra Dexcom en myDiabby verbonden zijn, **stuurt Dexcom automatisch eenmaal per uur gegevens** naar myDiabby. De getoonde gegevens lopen 3 uur achter op de laatst beschikbare gegevens.

> Indien u een **Dexcom G6** gebruikt in combinatie met de **t:slim X2 Tandem** insulinepomp, volstaat het dat u de pomp uploadt naar myDiabby om de **Tandem + G6** pompgegevens op myDiabby te laten verschijnen.

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:  
[support@mydiabby.com](mailto:support@mydiabby.com) of per telefoon

France : 01 76 40 01 78  
Belgique : 02 320 11 96

MDHC SAS  
66 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

Document van toepassing vanaf versie 2.19 van myDiabby Healthcare



0459

GCDCXCV03D2021601NL