


VERBINDINGSGIDS

Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare*



Koppeling van de lezer met de applicatie myDiabby

- 1 Zorg ervoor dat de bloedglucosemeter is ingesteld op de juiste datum en het juiste uur om de connectiviteit met de applicatie myDiabby te gebruiken.
- 2 Activeer **Bluetooth op de smartphone**
- 3 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»
- 4 Selecteer «Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan», en selecteer vervolgens uw lezer in de lijst

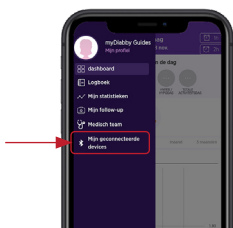

- 5 Klik op de knop «Ik verbind mijn lezer»



- 6 Zet de bloedglucosemeter in koppelingsmodus. Doe dit als volgt:
 - Schakel de bloedglucosemeter in met de **S-knop**
 - Druk lang op de **S-knop** tot «SET» verschijnt op het scherm van de lezer
 - Druk op de knop ► om «Yes» te zien links onderaan op het scherm, druk vervolgens op de **S-knop**
 - «bT» verschijnt op het scherm van de lezer. Druk driemaal ► op om «PAir» te zien verschijnen rechts onderaan op het scherm van de lezer. Druk vervolgens op de **S-knop**.
 - Het woord «Pin» verschijnt op het scherm van de lezer.



- 7 Op de applicatie myDiabby klikt u op de knop “Mijn lezer zoeken”



- 8 Geef in de applicatie de 6-cijferige code in op het scherm van de bloedglucosemeter, bevestig vervolgens.



- 9 De lezer verschijnt op het scherm. Klik op “Toevoegen”




Dagelijks gebruik

- 1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.
- 2 Zodra het resultaat van de bloedsuikerspiegel op het scherm van de lezer verschijnt, **verwijdert u het strookje uit de lezer**, vervolgens opent u de applicatie myDiabby op de telefoon in de buurt van de lezer. (Controleer of Bluetooth actief is op de smartphone)
- 3 **Open de applicatie myDiabby** in de buurt van de bloedglucosemeter. (Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op de smartphone).
- 4 **Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt automatisch verstuurd naar de applicatie myDiabby!**



Als u zwangerschapsdiabetes hebt:

zodra de bloedsuikerspiegel op de applicatie myDiabby verschijnt, **VINKT** u het moment van de dag af of **VERIFIEERT** u het moment van de dag zodat het resultaat op de juiste plaats in de notebook wordt geplaatst. U kunt **opmerkingen** of insulinedoses toevoegen.

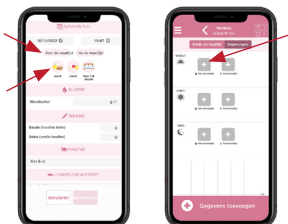

GDCPCSVO2D20241601NL

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:
support@mydiabby.com of per telefoon

France : 01 76 40 01 78
Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.



Document van toepassing vanaf versie 2.19 van myDiabby Healthcare

0459