

## VERBINDINGSGIDS

Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare\*



### ACCU-CHEK®

## Koppeling van de lezer met de applicatie myDiabby


Zorg ervoor dat de bloedglucosemeter is ingesteld op de juiste datum en het juiste uur om de connectiviteit met de applicatie myDiabby te gebruiken.

**1** Noteer op een papier het serienummer van de Bluetooth-adapter



**2** Activeer Bluetooth op de smartphone

**3** Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»

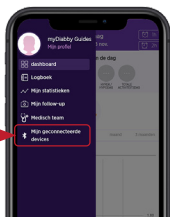

**4** Selecteer «Ik sluit mijn capillaire bloedglucosemeter aan», en selecteer vervolgens uw lezer in de lijst



**5** Klik op de knop «Ik verbind mijn lezer»



**6** Sluit de Bluetooth-adapter aan op de bloedglucosemeter Accu-Chek Mobile



**7** Schakel de Bluetooth-adapter in door op de zijknop te drukken. Hierdoor wordt de bloedglucosemeter ingeschakeld en gaat deze naar «koppelingsmodus», en knippert de adapter groen.



8 Op de applicatie myDiabby klikt u op de knop “Mijn lezer zoeken”



9 Voer in de applicatie het 6-cijferige serienummer van de adapter in, dat u genoteerd hebt, en bevestig vervolgens.



10 De lezer verschijnt op het scherm. Klik op “Toevoegen”

Uw bloedglucosemeter is nu gekoppeld met uw applicatie myDiabby!




## Dagelijks gebruik

- 1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter zoals gewoonlijk.
- 2 Zodra het resultaat van de bloedsuikerspiegel op het scherm verschijnt, **schakelt u de Bluetooth** van de adapter in met de zijknop.
- 3 **Open de applicatie myDiabby** in de buurt van de bloedglucosemeter. *(Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op de smartphone).*
- 4 Het resultaat van de bloedsuikerspiegel wordt automatisch verstuurd naar de applicatie myDiabby!



### Als u zwangerschapsdiabetes hebt:

zodra de bloedsuikerspiegel op de applicatie myDiabby verschijnt, **VINKT** u het moment van de dag af of **VERIFIEERT** u het moment van de dag zodat het resultaat op de juiste plaats in de notebook wordt geplaatst. U kunt **opmerkingen** of insulinedoses toevoegen.

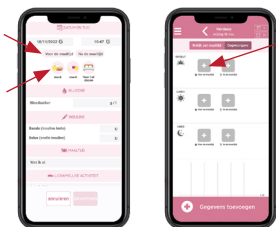

GCACCMV02D20241601NL

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:  
[support@mydiabby.com](mailto:support@mydiabby.com) of per telefoon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS  
66 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.



Document van toepassing vanaf versie 2.19 van myDiabby Healthcare

0459