

## VERBINDINGSGIDS



Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare\*



## NFC-verbinding voor NovoNordisk NovoPen 6 en Echo Plus-pennen

De gegevensoverdracht gebeurt via de NFC-antenne door de insulinepen dicht bij uw smartphone te brengen.


- 1 Activeer de NFC op uw smartphone** (in de instellingen) - op sommige smartphones is NFC standaard geactiveerd en kan het niet worden uitgeschakeld
- 2 Meld u aan op de applicatie myDiabby en open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»**
- 3 Selecteer «Ik sluit een insulinepen aan»**

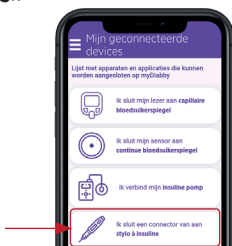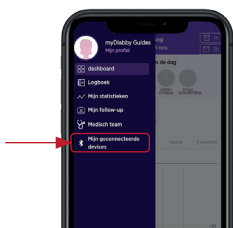

- 4 Selecteer «Novo Nordisk NovoPen® 6 / NovoPen Echo® Plus Insulinepen», en klik vervolgens op «Ik verbind mijn apparaat»**



- 5 Het zoeken is bezig:**
  - Bij Android brengt u de insulinepen naar de NFC-chip op uw smartphone:
  - Op de iPhone brengt u de insulinepen dicht bij de NFC-chip. Uw iPhone gaat dan trillen zodra de pen is gedetecteerd en er verschijnt een bevestiging op het scherm.

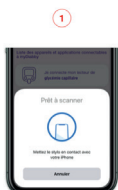


Er verschijnt een pop-up met een voortgangsbalk: de pen wordt gedetecteerd, Verplaats de pen niet overdrachtstijd



**6** Selecteer uw pen en bevestig uw keuze.



**7** Selecteer het insulinetype van uw pen: alle compatibele insulines worden in de lijst **weergegeven**

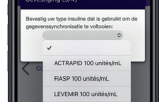


**8** Uw pen lijkt verbonden, druk op op **“Synchronisatie”** om de gegevens te herstellen op de pen aanbrengen **door stap 5 te herhalen.**

**Uw gegevens worden gesynchroniseerd met uw account myDiabby Gezondheidszorg!**



**Als u zwangerschapsdiabetes hebt:**

zodra de bloedsuikerspiegel op de applicatie myDiabby verschijnt, **VINKT** u het moment van de dag af of **VERIFIEERT** u het moment van de dag zodat het resultaat op de juiste plaats in de notebook wordt geplaatst.

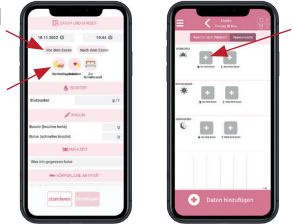

## Dagelijks gebruik

- 1** Meld u aan op de applicatie myDiabby
- 2** Open het tabblad «Mijn geconnecteerde devices»
- 3** Bij de pen die u hebt aangesloten, drukt u op «Synchroniseren»
- 4** Beweeg uw insulinepen naar de NFC-antenne van uw smartphone totdat u een trilling voelt of een bevestigingsgeluid hoort
- 5** Uw gegevens worden opgenomen!

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:  
[support@mydiabby.com](mailto:support@mydiabby.com) of per telefoon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS  
66 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

Document van toepassing vanaf versie 2.25 van myDiabby



0459