




VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*

Kopplung des Blutzucker-Messgeräts mit der App myDiabby

- 1 Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit auf dem Blutzucker-Messgerät richtig eingestellt sind, um die Konnektivität mit der App myDiabby nutzen zu können.
- 2 Aktivieren Sie **Bluetooth** auf Ihrem Smartphone
- 3 Melden Sie sich bei **myDiabby** an und öffnen Sie den Tab „**Meine verbundenen Geräte**“
- 4 Wählen Sie „**Ich verbinde mein kapillares Blutzucker-Messgerät**“ und wählen Sie danach Ihr Messgerät aus der Liste

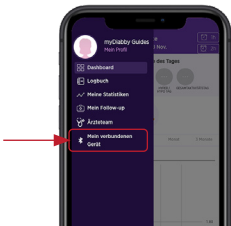

- 5 Klick auf den Button „**Ich verbinde mein Messgerät**“



- 6 Das Blutzucker-Messgerät in den Pairing-Modus stellen. Dazu:

- Das Blutzucker-Messgerät über die Taste **S** einschalten
- Länger auf die Taste **S** drücken, bis „**SET**“ auf dem Display des Messgeräts erscheint
- Klick auf Taste **▶** bis „**Yes**“ unten links auf dem Display zu sehen ist, dann die Taste **S** drücken „**bT**“ erscheint auf dem Display des Messgeräts. Dreimal auf drücken **▶** bis „**Pair**“ unten rechts auf dem Display des Messgeräts erscheint. Danach **Taste S drücken**
- Das Wort „**Pin**“ erscheint auf dem Display des Messgeräts.




- 7 In der App myDiabby, Klick auf den Button „Mein Messgerät suchen“



- 8 Geben Sie in der App den sechsstelligen Zahlencode ein, der auf dem Display des Messgeräts zu sehen ist, dann Bestätigen.



- 9 Das Messgerät wird eingeblendet. Klick auf „Hinzufügen“

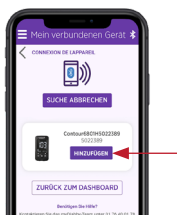


Täglicher Gebrauch

- 1 Die **Blutzucker-Messung** wie gewohnt mit dem Blutzucker-Messgerät durchführen.
- 2 Nachdem das Ergebnis auf dem Display des Messgeräts eingeblendet wird, **den Teststreifen vom Messgerät nehmen**, danach die App myDiabby in der Nähe zum Messgerät auf dem Telefon öffnen (darauf achten, dass Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist).
- 3 **Öffnen Sie die App myDiabby** in der Nähe des Blutzucker-Messgeräts. (Überprüfen Sie, dass Bluetooth auf dem Smartphone eingeschaltet ist).
- 4 Das Ergebnis der Blutzuckermessung wird automatisch an die App myDiabby übertragen.



Im Fall von Schwangerschaftsdiabetes:

Nach Einblenden des Blutzuckerwerts in der App myDiabby, die Tageszeit **ANKREUZEN** oder **ÜBERPRÜFEN**, damit das Ergebnis an der richtigen Stelle im Logbuch erscheint. Sie können **Anmerkungen** oder Insulindosen **hinzufügen**.

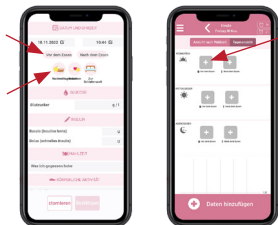

GCDPCSVO1D20230603DE

Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459