



Contour
next ONE[®]
Blood Glucose
Monitoring System

VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare*

Kopplung des Blutzucker-Messgeräts mit der App myDiabby

1 Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit auf dem Blutzucker-Messgerät richtig eingestellt sind, um die Konnektivität mit der App myDiabby nutzen zu können.

2 Aktivieren Sie **Bluetooth auf Ihrem Smartphone**



3 Melden Sie sich bei **myDiabby** an und öffnen Sie den Tab „**Meine verbundenen Geräte**“

4 Aktivieren Sie **Bluetooth auf Ihrem Blutzucker-Messgerät Contour next ONE**: Dazu **die Taste OK drücken**, bis die **BLAUE Kontrolllampe auf dem Messgerät blinkt** und das Symbol Bluetooth  auf dem Display des **Messgeräts leuchtet**.

5 Klicken Sie auf den Button „**Ich verbinde mein Messgerät**“, dann auf „**Mein Messgerät suchen**“, um das Koppeln zu starten.

6 Das Messgerät wird eingeblendet. Klick auf „**Hinzufügen**“

Ihr Blutzucker-Messgerät ist jetzt mit Ihrer App myDiabby gekoppelt!

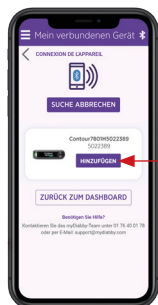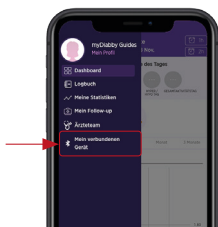

Täglicher Gebrauch

- 1 Die **Blutzucker-Messung** wie gewohnt mit dem Blutzucker-Messgerät durchführen.




- 2 Nachdem das Ergebnis auf dem Display des Messgeräts eingeblendet wird, den Teststreifen vom Messgerät nehmen, danach die App myDiabby in der Nähe zum Messgerät auf dem Telefon öffnen (darauf achten, dass Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist).

- 3 Überprüfen Sie, dass **Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert** ist und **öffnen Sie die App myDiabby bei weiterhin eingeschaltetem Messgerät.**


- 4 Das Ergebnis der Blutzuckermessung wird automatisch an die App myDiabby übertragen.

Wenn die Mahlzeit oder die dem Blutzuckerwert entsprechende Tageszeit geändert werden muss, anklicken und die entsprechenden Angaben machen.

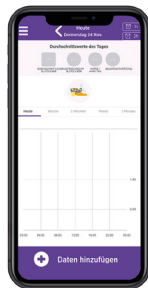

Im Fall von Schwangerschaftsdiabetes:

Nach Einblenden des Blutzuckerwerts in der App myDiabby, die Tageszeit **ANKREUZEN** oder **ÜBERPRÜFEN**, damit das Ergebnis an der richtigen Stelle im Logbuch erscheint. Sie können **Anmerkungen** oder Insulindosen **hinzufügen**.

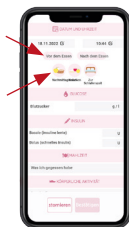

GCCNOV02D20241601DE

Bei Fragen zur App myDiabby:
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459