


- 3 Open de myDiabby applicatie (op smartphone OF computer) en klik op «Gegevens toevoegen».



- 4 Scroll naar de onderkant van het scherm en klik op «Een .csv-bestand importeren» en vervolgens op «Een CareLink .csv-bestand importeren».

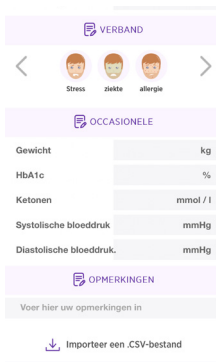

- 5 Selecteer het .csv-bestand dat is opgeslagen op uw telefoon of computer van de CareLink-site

- 6 **Resultaten van de MiniMed 780G-pomp en de bijbehorende sensor worden nu gedeeld op de myDiabby-toepassing.**



OPMERKINGEN

Alle CareLink-gegevens worden gedeeld op myDiabby Healthcare wanneer ze worden gedeeld: continue glucosegegevens, capillaire bloedglucosewaarden, basaal, bolus, koolhydraten, pompinformatie, enz.

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:
support@mydiabby.com of per telefoon
France : 01 76 40 01 78 | Belgique : 02 320 11 96

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.



Document van toepassing vanaf versie 2.24 van myDiabby Healthcare

myDiABBY HEALTHCARE

VERBINDINGSGIDS

Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare*




Medtronic MiniMed 780G + 740G

Fase 1 : Pompgegevens op het CareLink-platform zetten

Als u uw pomp gebruikt met de **MiniMed Mobile**-applicatie, worden uw gegevens automatisch opgeslagen op CareLink.



Als u de applicatie niet gebruikt, downloadt u de pompgegevens van CareLink met de reader die bij de pomp hoort. Meer informatie op: carelink.minimed.eu/app/install-uploader

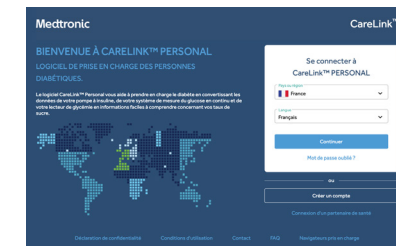

Fase 2 : CareLink gegevens delen op myDiabby Healthcare


GCMCLV03D0240705NL

Methode 1:

Uw Carelink account koppelen aan uw myDiabby Healthcare account

1 Open de **myDiabby** applicatie (op smartphone OF computer) en klik op het tabblad «Mijn geconnecteerde devices».

2 Klik op de categorie «Ik sluit een gezondheidstoepassing aan»

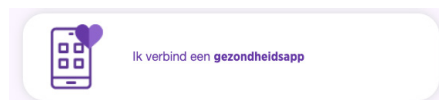

3 Selecteer «CareLink» in de lijst met compatibele toepassingen.



4 Geef uw **CareLink-ID** op in het speciale pop-upvenster. Dit is dezelfde login die u gebruikt om verbinding te maken met CareLink of de **MiniMed Mobile**-toepassing.

Deel uw CareLink-gegevens op myDiabby Healthcare

Vul uw CareLink-gebruikersnaam in:

Dit is de identificatie die u gebruikt op CareLink of de MiniMed Mobile-applicatie

bevestigen

5 Ga naar uw **CareLink-account** om het delen te accepteren door op de link in de pop-up te klikken of via de automatische e-mail die u hebt ontvangen.

Delen met kliniek

Nieuwe verzoeken:

myDiabby Healthcare Nieuw verzoek

Frankrijk

75008, FR


Naam patiënt: NL test

Toestaan Weigeren

Uw medische hulpverlener heeft gevraagd om een koppeling met uw CareLink™ Personal-account te maken. Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, kan uw medische hulpverlener de gegevens van uw gekoppelde medische apparaten bekijken die buiten uw bezoeken aan de kliniek geüpload zijn naar uw CareLink™ Personal-account.

6 Zodra u het delen heeft geaccepteerd, **gaat u terug naar uw myDiabby Healthcare account en de gegevens worden nu automatisch gedeeld!**

Het kan een paar minuten duren voordat de gegevens worden opgehaald als je voor de eerste keer inlogt.

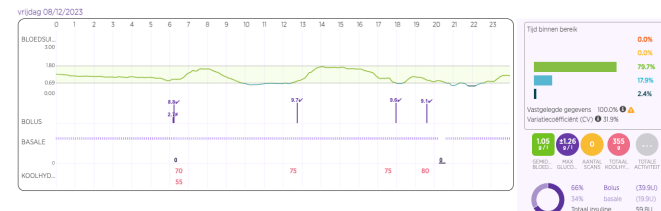

OPMERKINGEN

Alle CareLink-gegevens worden gedeeld op myDiabby Healthcare wanneer ze worden gedeeld: continue glucosegegevens, capillaire bloedglucosewaarden, basaal, bolus, koolhydraten, pompinformatie, enz.

Methode 2 :

Gegevens handmatig herstellen van CareLink

Vanuit de webbrowser op een computer OF een smartphone:

1 Ga naar carelink.minimed.com en maak verbinding met de patiëntenaccount met dezelfde identificaties als voor de **MiniMed Mobile**-applicatie, of rechtstreeks met de identificaties van **CareLink**.

2 Klik op de CareLink-website op :
- Het tabblad «**Rapporten**» linksboven (pictogram met curve)

- Dan, onderaan de pagina, «**Gegevens exporteren (CSV)**».

> Een .csv-bestand met de pompresultaten wordt opgeslagen op de telefoon of computer.

