

## VERBINDINGSGIDS

Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare\*




- 1 **Verbind de TouchCare Nano of 300-pomp via Bluetooth met de EasyPatch-toepassing of upload uw PDM-gegevens naar de EasyTouch-toepassing, volgens de insulinepomphandleiding.**

Met de EasyPatch-applicatie kan de pomp worden bediend via de smartphone, waarbij de gegevens automatisch worden geüpload naar de **Medtrum-cloud**. De gegevens die beschikbaar zijn op de Medtrum cloud worden vervolgens automatisch verzonden naar myDiabby Healthcare, de applicatie die zorgt voor een link met het medische team.

- 2 **Log in op uw myDiabby Healthcare account vanaf een computer OF de myDiabby mobiele applicatie.**

- 3 **Klik op het tabblad «Mijn geconnecteerde devices», vervolgens op «Ik verbind mijn bloedsuikerspiegel sensor continu».**

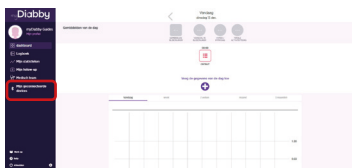

- 4 **Selecteer de Medtrum-knop**




- 5 **Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw EasyPatch / EasyTouch account in. Lees de gebruiksvoorwaarden, vink het vakje voor acceptatie aan, voer uw naam in het daarvoor bestemde veld in en klik op «Autoriseer» om het delen van gegevens te accepteren.**

- 6 Dit bericht verschijnt op het scherm en bevestigt dat het **Medtrum cloud account verbonden is met myDiabby Healthcare**. Klik op «Terug» om terug te keren naar myDiabby Healthcare.



## Je insulinepomp gegevens worden nu gedeeld op myDiabby Healthcare!

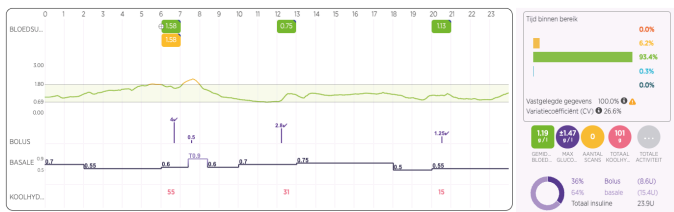

### MERK OP

Controleer regelmatig of de gegevens van uw TouchCare insulinepomp zichtbaar zijn op de Medtrum cloud zodat het medisch team de resultaten kan zien op myDiabby Healthcare.

> Het downloaden van gegevens gebeurt automatisch in de EasyPatch toepassing en handmatig in de EasyTouch toepassing.

> Zodra het Medtrum cloud account en myDiabby Healthcare verbonden zijn, **stuurt de Medtrum cloud automatisch elke 8 uur gegevens ouder dan 3 uur naar myDiabby Healthcare**.

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:  
[support@mydiabby.com](mailto:support@mydiabby.com) of per telefoon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS  
66 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

Document van toepassing vanaf versie 2.23 van myDiabby Healthcare



0459