

VERBINDINGSGIDS

Deze verbindingsgids geeft de verbindingselementen die specifiek zijn voor uw apparaat. Raadpleeg de handleiding voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van myDiabby Healthcare*




FreeStyle Libre 

Als u de **FreeStyle LibreLink** of **LibreView** toepassing gebruikt, ga dan direct naar stap 3.

- 1** Maak hier een LibreView-account aan:
www.libreview.com/auth/register
- 2** **Upload** de gegevens van uw FreeStyle Libre reader naar uw LibreView account met behulp van een computer en de gele USB-kabel die bij de reader is geleverd.
Hulp nodig bij het downloaden van gegevens naar LibreView?
Ga naar : pat.libreview.io/support

- 3** Meld u aan op uw **myDiabby-account** vanaf een computer **OF** de mobiele applicatie.

- 4** Klik op het tabblad «**Mijn geconnecteerde devices**», vervolgens op «**Ik verbind mijn bloedsuikerspiegel sensor continu**».

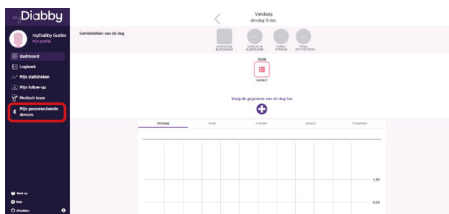

- 5** Selecteer de knop **FreeStyle Libre**

FreeStyle Libre 

6 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw FreeStyle LibreLink / LibreView-account in.

Lees de gebruiksvoorwaarden en klik vervolgens op «**Autoriseer**» om het delen van gegevens te accepteren.

7 Dit bericht verschijnt op het scherm en bevestigt dat het LibreView account verbonden is met myDiabby Healthcare.

Klik op «**Terug**» om terug te keren naar myDiabby Healthcare.



Uw continue glucose gegevens worden nu gedeeld op myDiabby Healthcare!



MERK OP

Upload regelmatig gegevens van de FreeStyle Libre sensor naar LibreView zodat het medische team de resultaten kan zien op myDiabby Healthcare.

> Zodra LibreView en myDiabby verbonden zijn, stuurt LibreView automatisch continue glucosegegevens naar myDiabby Healthcare zodra deze beschikbaar zijn. Dit kan een vertraging van enkele minuten veroorzaken tussen het laden van de gegevens in LibreView en het weergeven ervan op myDiabby Healthcare.

> Als u gegevens van uw FreeStyle Libre meter op myDiabby Healthcare wilt ophalen met een andere methode, raadpleeg dan ons helpcentrum: help.diabby.com

Goed gebruiksdokument voor patiënten die deze medische hulpmiddelen gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleidingen voor FreeStyle Libre 2, FreeStyle LibreLink en LibreView: <https://www.diabetescare.abbott/support/manuals/fr.html>
De sensorbehuizing, FreeStyle, Libre en aanverwante merken zijn handelsmerken van Abbott en worden met toestemming gebruikt.

Voor een vraag over de applicatie myDiabby:
support@mydiabby.com of per telefoon

France : 01 76 40 01 78
Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS
66 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
FRANCE

*De handleiding kan worden gedownload en geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.



Document van toepassing vanaf versie 2.19 van myDiabby Healthcare

0459