


## VERBINDUNGSLEITFADEN

Dieser Verbindungsleitfaden enthält die spezifischen Verbindungselemente für Ihr Gerät. Siehe die Anleitung für alle Informationen zur Benutzung von myDiabby Healthcare\*





- Legen Sie ein Dexcom Clarity-Benutzerkonto auf folgender Website an:  
<https://uam2.dexcom.com/index.html#/register>

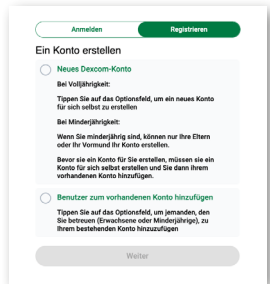

- Laden Sie den Dexcom Clarity Uploader auf der folgenden Website herunter:  
<https://clarity.dexcom.eu/?locale=fr-FR#/home-user-upload>  
Spielen Sie danach unter Befolgen der Anweisungen auf dem Display die Daten des Sensors auf Dexcom Clarity auf.





- Melden Sie sich auf einem Rechner ODER über die mobile App beim myDiabby-Konto an:
- Klick auf den Tab „Meine verbundenen Geräte“, dann auf „Ich verbinde meinen kontinuierlich messenden Blutzuckersensor“.

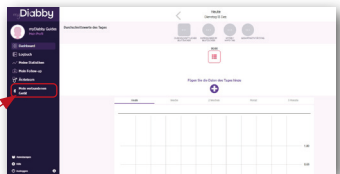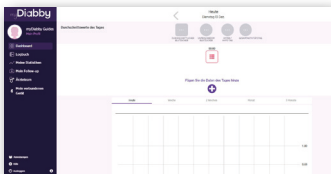

- 5** Wählen Sie den Button **Dexcom** und klicken dann auf den Button **„MEINE GESUNDHEITS-APP VERBINDEN“**.



- 6** Geben Sie **Benutzernamen und Kennwort für das Dexcom-Konto ein**. Lesen Sie die Benutzungshinweise und geben Sie **danach Ihren Namen ein und klicken auf „Zustimmen“**.

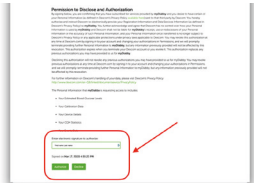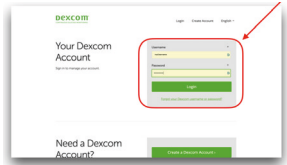

- 7** Diese Meldung wird auf dem Display eingeblendet und bestätigt die **Verbindung des Dexcom-Kontos mit myDiabby**. Kehren Sie durch Klick auf **„Zurück“** zu myDiabby Healthcare zurück.

**Die kontinuierlich gemessenen Blutzuckerwerte werden jetzt auf myDiabby Healthcare geteilt!**



## HINWEIS

Laden Sie die Daten des Dexcom-Sensors **regelmäßig auf Dexcom Clarity herunter**, damit das Ärzteteam sie auf myDiabby sehen kann.

> Nach Verbinden von Dexcom und myDiabby sendet **Dexcom einmal stündlich automatisch Daten an myDiabby**. Die angezeigten Daten weisen einen Verzug um 3 Stunden gegenüber den letzten verfügbaren Daten auf.

> Wenn Sie ein Dexcom G6 verwenden, das mit einer Insulinpumpe Tandem t:slim X2 verbunden ist, reicht das Herunterladen der Pumpe auf myDiabby aus, damit die Daten der Tandem Pumpe und des Sensors G6 auf myDiabby erscheinen.

Bei Fragen zur App myDiabby:  
support@mydiabby.com oder per Telefon

France : 01 76 40 01 78

Belgique : 02 320 11 96



MDHC SAS  
66 avenue des Champs Elysées  
75008 Paris  
FRANCE

\*Die Anleitung kann auf der Plattform myDiabby Healthcare eingesehen oder heruntergeladen werden.



0459